


NOTICE D'UTILISATION

Fauteuil releveur

4 moteurs

Thelma

Ref.1605531020

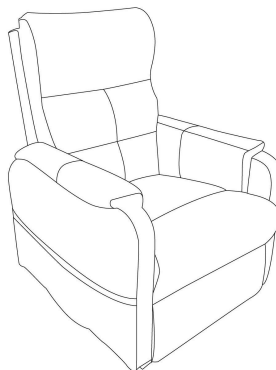

Lisez ce manuel avant toute utilisation et respectez toutes les consignes indiquées.

Table des matières

1.	Précautions d'usage.....	Page 1
2.	Spécifications du fauteuil.....	Page 4
3.	Assemblage du fauteuil.....	Page 4
4.	Instructions de nettoyage.....	Page 7
5.	Garantie.....	Page 8

1. PRECAUTIONS D'USAGE

Avant toute utilisation, il est indispensable de prendre connaissance de cette notice, celle-ci contient des conseils en matière d'utilisation et d'entretien pour vous garantir une meilleure sécurité.

- Le fauteuil doit être assemblé correctement selon les instructions décrites.
Le fabricant, ses agents et distributeurs ne sont pas responsables de dommages causés par un mauvais assemblage du fauteuil, ou par sa mauvaise utilisation.

- **Températures** ambiantes en fonctionnement et entreposage :
 - En fonctionnement : température minimale 10°C, température maximale 50°C
 - En entreposage : stocker le fauteuil dans un endroit sec, entre 5°C et maximum 70°C
Utiliser des emballages de protection pour protéger le fauteuil contre toute corrosion, rouille ou corps étrangers.
- Ne pas placer le fauteuil près d'une source de chaleur ou d'ignition (cheminée, appareil de chauffage électrique ou à combustion par gaz ou pétrole, etc...).



ATTENTION !

Dans le cas où le fauteuil est stocké dans une pièce froide puis est amené dans un endroit chaud, il est conseillé de l'utiliser une heure après, de manière à optimiser ses performances.

• Positionnement

- Le fauteuil doit être placé sur une surface plate et sèche.
- Prévoir un espace suffisant devant et derrière le fauteuil pour permettre le basculement correct en position allongée.



ATTENTION !

- . S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles devant et derrière le fauteuil avant opération.
- . Ne pas insérer de doigts ou d'objets entre le fauteuil et le repose-jambes.

- Ne pas sauter ou jouer sur le fauteuil, les enfants doivent être surveillés par un adulte lors de l'utilisation du fauteuil.
- Garder les animaux domestiques à distance lorsque le fauteuil est en mouvement.
- Quand le fauteuil est incliné ou est en mouvement, **ne pas mettre les doigts ou les mains entre le siège et le repose-jambes, ni sur le mécanisme à ciseaux**, au risque de gravement vous blesser.
- Ne pas actionner le fauteuil si quelque chose gêne sous ou devant le repose-jambes, ou sous ou derrière le fauteuil. Garder ces endroits dégagés sans aucune obstruction.
- Tenir suffisamment éloignés du fauteuil tous objets, câbles électriques, couvertures ou vêtements risquant d'être pincés ou écrasés par les articulations du mécanisme.
- Le repose-jambes et son extension ne sont pas un siège, ne vous asseyez pas dessus, le fauteuil pourrait basculer et l'armature être détériorée.



- Ne retirez pas d'objets tombés à l'intérieur, ou sous le fauteuil lorsqu'il est branché.
- Ne vous laissez pas tomber dans le fauteuil pour vous y installer, ou lorsqu'il est en position de relevage. Se laisser tomber dans le fauteuil l'endommagerait et pourrait vous blesser.
- Il est déconseillé de fumer dans ce fauteuil si vous avez des difficultés pour en sortir ou pour vous déplacer.
- Ne pas faire tomber la télécommande.
- Ne pas placer des objets lourds sur le câble de la télécommande.
- Le fauteuil ne doit être utilisé qu'avec le moteur, le chargeur et la télécommande d'origine fournis avec ce fauteuil.
- Vérifiez que la tension électrique correspond aux spécifications indiquées pour le fauteuil.
- **Ne pas brancher ou débrancher la prise murale avec les mains mouillées.** Cela peut provoquer des blessures ou endommager le fauteuil.
- Pour débrancher la prise murale, tirez-la par la prise et non par le cordon.
- Ne pas utiliser le fauteuil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou si la prise électrique est trop lâche.
- **Lorsque le fauteuil n'est pas utilisé, débrancher le cordon d'alimentation** de l'alimentation principale pour éviter toute surchauffe.



ATTENTION !

. Pour réduire les risques de choc électrique, n'immergez aucun des composants électriques dans un liquide et ne renversez pas non plus de liquide sur les composants électriques. N'ouvrez aucun des composants électriques.

. La garantie est annulée si un composant électrique est ouvert par toute autre personne qu'un réparateur professionnel, les réparations doivent être faites par une main d'œuvre qualifiée ou par le service après-vente de votre revendeur.

Le fauteuil ne doit pas être utilisé :

Lors des conditions suivantes, mettre l'appareil immédiatement hors tension et débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.

- Si de l'eau est accidentellement renversée sur le fauteuil, cela peut entraîner un choc électrique.
- Si une situation anormale ou un dysfonctionnement est détecté.
- S'il y a une panne de courant, un risque peut être causé lorsque l'alimentation est rétablie de façon inattendue.
- S'il y a un orage avec de la foudre.

- Examinez fréquemment le fauteuil pour détecter des signes d'usure ou de dommages. S'il y a de tels signes, ou si le fauteuil a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, contactez votre revendeur pour plus d'informations.

2 . SPECIFICATIONS DU FAUTEUIL

- Revêtement : tissu 100 % polyester
- Structure : bois contreplaqué
- Châssis : mécanisme en acier, équipé de 4 moteurs
- Mousse d'assise et de repose-jambes : polyuréthane
- Mousse de dossier : rembourrage de fibres creuses siliconées 100 % polyester
- Alimentation : secteur 220V+/- 10V
- Poids du fauteuil : 47 kg
- Charge maximale : 135 kg



Avertissement

Interférences électromagnétiques et radio-magnétiques (EMI/RFI)

. L'utilisateur peut aider à réduire les interférences électromagnétiques en conservant une distance minimale de 3 mètres entre le fauteuil et les appareils portatifs et les équipements de communication de type "RF" émettant 10 W ou plus de puissance radio.

. Prenez garde aux téléphones cellulaires, radio émetteur, ordinateur portable et autres radio émetteurs, car leurs ondes radio peuvent affecter le fonctionnement de votre fauteuil.

3 . ASSEMBLAGE DU FAUTEUIL

Déballez soigneusement le fauteuil afin d'éviter tout accident et d'empêcher qu'il s'abîme. Jetez, recyclez ou rangez les sachets et revêtements plastiques de manière adéquate, car ils peuvent constituer un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.


Remarque :

Ne pas assembler le fauteuil si sa structure, son mécanisme, ou des parties du fauteuil sont endommagés. Vérifiez soigneusement toutes les pièces avant d'assembler le fauteuil.

En cas de problème, contactez votre revendeur.


Etape 1 :

Insérer le dossier (A) sur les broches en métal de l'assise (B)

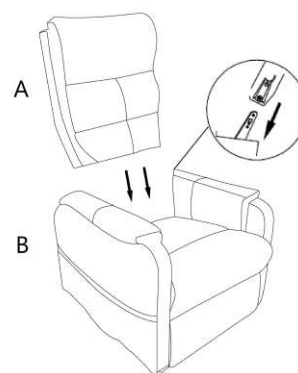

Etape 2 :


Tourner manuellement les **patins** à vis pour niveler la hauteur du fauteuil et bien le stabiliser au sol.

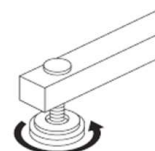

Etape 3 :

Contrôler que les câbles de raccordement ne soient pas endommagés (écrasements, coupures, isolation apparente des conducteurs internes, conducteurs métalliques apparents, boursoufflures).

Relier les câbles du chargeur, du moteur et de la télécommande. Assurez-vous que tous les câbles soient correctement connectés.

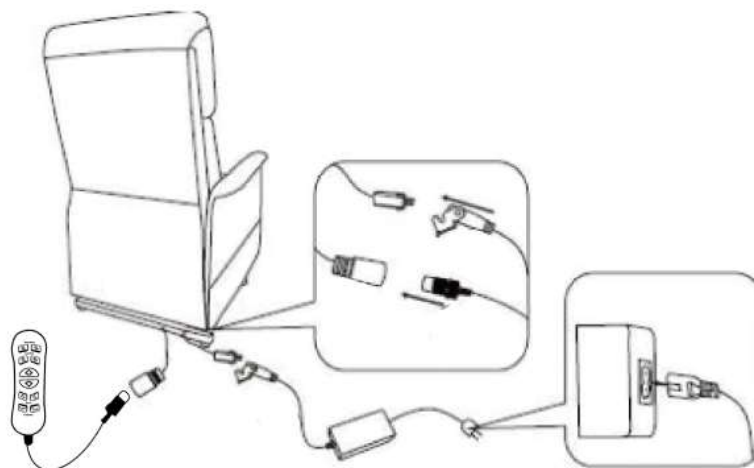


Placer le chargeur sur le plancher dans un endroit sec, bien ventilé et sans obstacles.


Branchez le cordon d'alimentation directement dans la prise murale, n'utilisez pas de cordon de rallonge électrique.

Etape 4 :


Fixer le rabat en tissu (C) sur la bande auto-agrippante au bas (D)

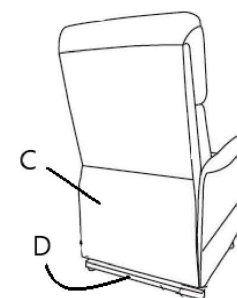

Télécommande filaire, pour soulever et incliner le fauteuil.

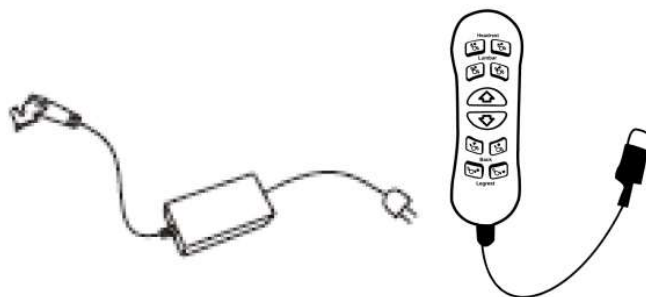

- La télécommande doit être placée hors de la portée des enfants lorsque le fauteuil n'est pas utilisé.
- Tenir la télécommande loin des sources de chaleur.
- Si le circuit de la télécommande ne fonctionne pas, ne pas le réparer soi-même, contactez votre revendeur.

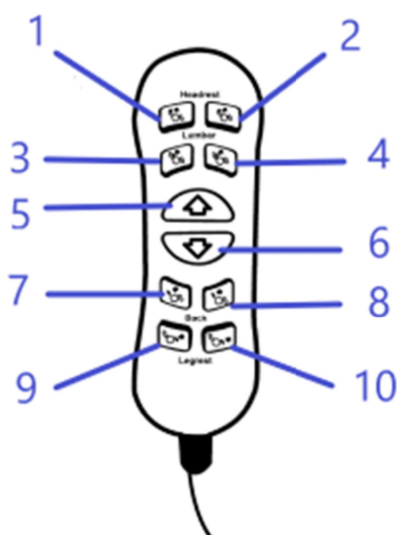

- 1.....Inclinaison de l'appuie-tête vers l'arrière
- 2.....Inclinaison de l'appuie-tête vers l'avant
- 3.....Réduction du soutien lombaire
- 4.....Augmentation du soutien lombaire
- 5.....Maintenir la touche enfoncée pour ramener toutes les fonctions à leurs positions neutres, tout en vous relevant à la verticale
- 6.....Maintenir la touche enfoncée pour abaisser le fauteuil en position assise ou inclinée
- 7.....Inclinaison du dossier
- 8.....Redressement du dossier
- 9.....Levée du repose-jambes
- 10.....Repli du repose-jambes

4. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



ATTENTION !

Débranchez l'alimentation lors de l'entretien et du nettoyage du fauteuil.

Entretien

- Faites une inspection visuelle régulière en vérifiant les dommages mécaniques et l'usure. Avec une utilisation régulière, l'intervalle d'entretien ne doit pas dépasser six mois.

Nettoyage de la télécommande

- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation avant tout nettoyage.
- La télécommande peut être nettoyée avec un chiffon sec et quelques gouttes d'un nettoyant domestique. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de vaporisateurs, ou d'agents nettoyants contenant de l'acide ou du sel.

Nettoyage du revêtement en tissu

- Isoler votre fauteuil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation et évitez les zones autour des connexions électriques.
- Nettoyer le revêtement à la main avec un chiffon trempé dans de l'eau chaude et avec des détergents ménagers, comme du savon noir ou du savon de Marseille.
Il est conseillé de tester au préalable votre produit détergent sur une partie cachée du fauteuil.
- Proscrire les produits nettoyants agressifs ou abrasifs : détergent en poudre, eau de javel, solvant, anticalcaire, etc.
- Pour le nettoyage, n'utilisez jamais de vapeur, ni de nettoyeur à haute pression.

5. GARANTIE

La garantie de votre fauteuil est de deux ans sur le mécanisme métallique, le(s) moteur(s), le chargeur et la télécommande, à compter de la date de fabrication.

Le fabricant et les distributeurs déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des conseils d'utilisation cités dans ce manuel, ou en cas d'utilisation anormale.

Sont exclus de la garantie :

- Les risques consécutifs à une modification structurelle ou à une réparation du mécanisme, des moteurs, du chargeur et de la télécommande par toute personne non habilitée par votre revendeur.
- Les dommages résultants d'accidents, de chutes ou de chocs.
- Les dommages liés au contact de substances liquides ou autres sur le fauteuil.
- Les fils abîmés, ou rongés par un animal domestique.
- Une manipulation ou un entreposage déficient ou inapproprié.
- L'usure normale résultant de l'utilisation du fauteuil.



Jiaxing Recare Furniture Co., Ltd
506 Meibei road, Jiaxing, Zhejiang, China

