



# exeol D print

Désinfectant des empreintes dentaires par pulvérisation

EMPREINTES DENTAIRES




Solution prête à l'emploi pour la désinfection des empreintes dentaires.

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.

⚠ **exeol D print** s'utilise non dilué sur une **empreinte préalablement rincée à l'eau** pour retirer le sang, les mucosités et tout autre résidu.


**Flacon 1L spray**

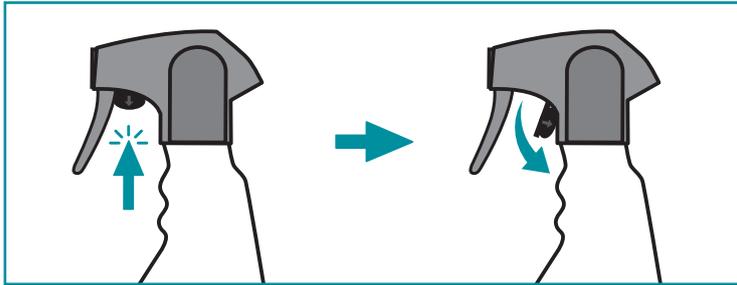

**1** Lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse. Déverrouiller la sécurité du spray.



**2** Après avoir éliminé l'excès d'eau, pulvériser uniformément toute la surface de l'empreinte.

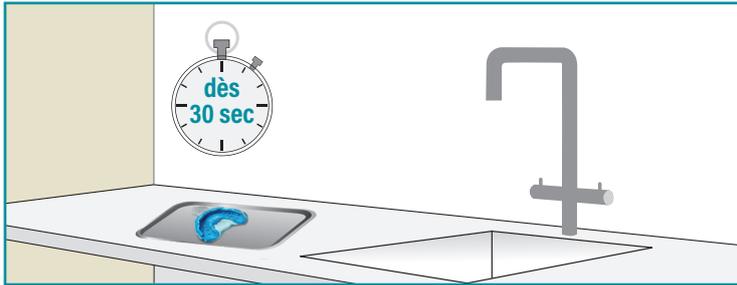


**3** Temps de contact : dès 30 sec. selon le spectre d'activité recherché. Respecter le temps de contact recommandé.



**4** Ne pas rincer.



**5** Déposer l'empreinte dans un emballage individuel selon les recommandations du fabricant du matériau pour empreinte.

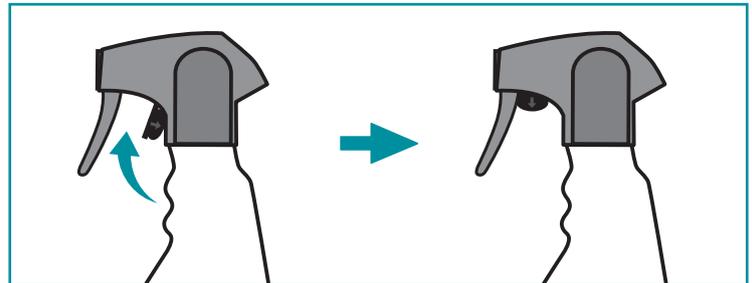

**6** Verrouiller la sécurité après utilisation.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



EPI:

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL



Dossier produit disponible sur [www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Marquage CE obtenu en 2023  
DM classe IIa

CE 0459



FABRIQUÉ EN FRANCE



Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France.  
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

DENTAL  
**exeol**

UNE DIVISION SODEL