

**APPROUVÉ**

Par CBrasseur, 15:13, 01/08/2024

# exeol sept E2

## Détergent désinfectant enzymatique pH neutre




► Solution enzymatique à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.

**INSTRUMENTS ENDOSCOPIE**

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.




### Dose 20mL

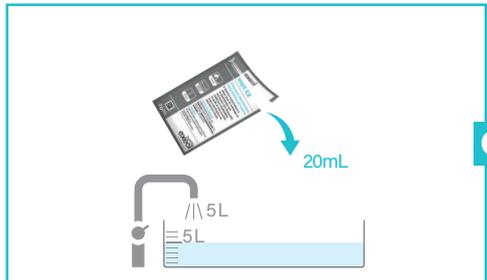


Déchirer la dose à l'aide de la pré-découpe. Verser une dose de 20mL dans 5L d'eau à température ambiante : 0,4% (4mL/L).

### Flacon 1L doseur

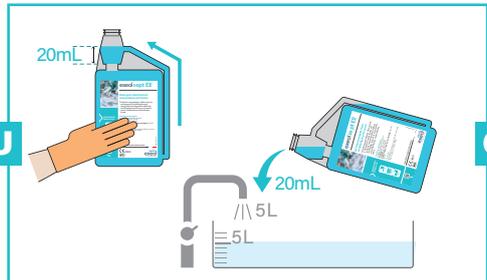

Enlever le bouchon et presser les flancs du flacon pour obtenir la dose souhaitée. Diluer la dose obtenue avec de l'eau à température ambiante : 0,4% (4mL/L). Refermer le flacon après utilisation.


### Bidon 5L

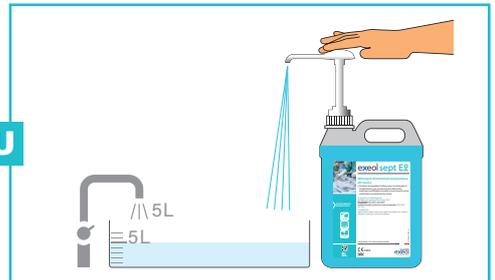


Lors de la première utilisation, retirer la bague d'inviolabilité puis dévisser le bouchon. Fixer la pompe de 20mL sur le bidon et l'amorcer. Ne pas utiliser la dose obtenue avant l'amorçage complet de la pompe. À l'aide de la pompe doseuse, diluer le concentré avec de l'eau à température ambiante : 0,4% (4mL/L).

### Utilisation :


La solution diluée et non utilisée peut être conservée en bac couvert pendant 72h.

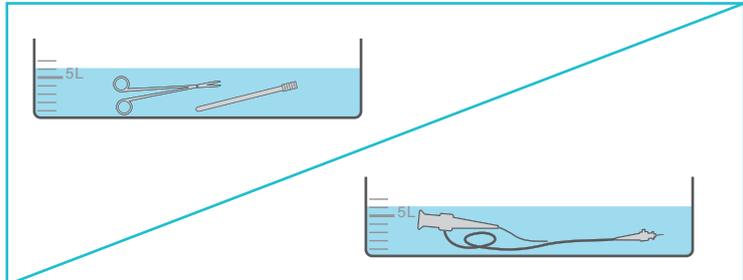

**1** Placer les dispositifs médicaux ouverts et démontés dans la solution en s'assurant qu'ils soient complètement immergés. Nettoyer, brosser, écouvillonner et irriguer les canaux si nécessaire.

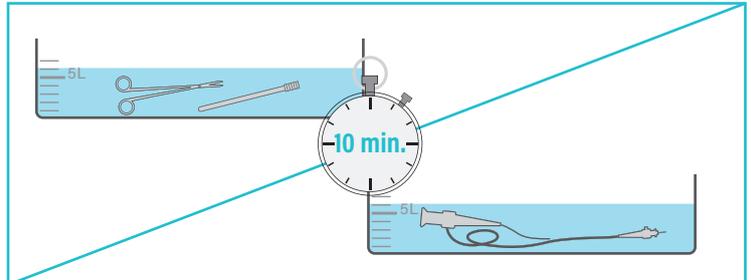

**2** Temps de contact : 10 min. Respecter le temps de contact recommandé.

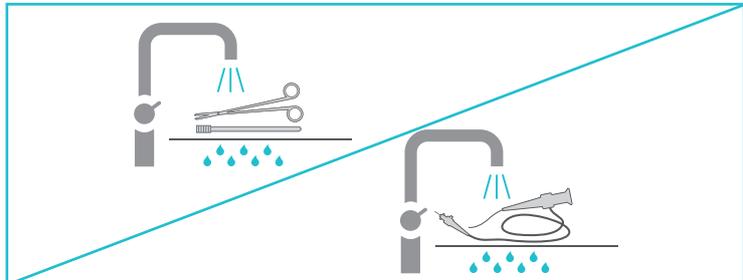

**3** Retirer les dispositifs médicaux, les rincer soigneusement à l'eau.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. EPI :



La solution utilisée doit être renouvelée après chaque utilisation. exeol sept E2 peut être utilisé en bac à ultrasons.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE



UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible sur [www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France.  
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Marquage CE obtenu en 2023  
DM classe IIa

