

# exeol PA

## Désinfectant de haut niveau

► Pour la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non invasifs.

À base d'acide peracétique.



INSTRUMENTS  
ENDOSCOPIE

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.

exeol PA est utilisable pendant 7 jours ou 50 trempages.


Il est recommandé de contrôler la validité du bain avec les bandelettes test exeol strips PA. En cas de résultat non conforme le bain doit être renouvelé.

exeol PA peut être utilisé dans les appareils de retraitement semi-automatiques des endoscopes qui sont compatibles avec l'acide peracétique. exeol PA est prêt à l'emploi et ne nécessite pas d'activation. Il est recommandé de mettre en place une ventilation au dessus du bain de trempage et de le couvrir aussi souvent que possible. Le bain doit être renouvelé en cas de contamination visible.


Nettoyer, rincer et égoutter les dispositifs médicaux à désinfecter avant immersion dans exeol PA.




### Bidon 5L

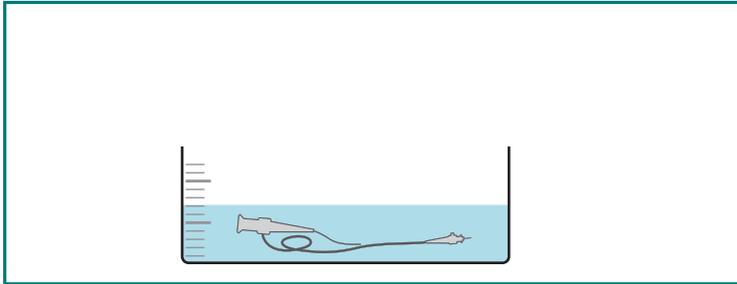



**1** Immerger complètement les dispositifs médicaux ouverts dans la solution. Toutes les surfaces et cavités doivent être entièrement recouvertes par la solution.

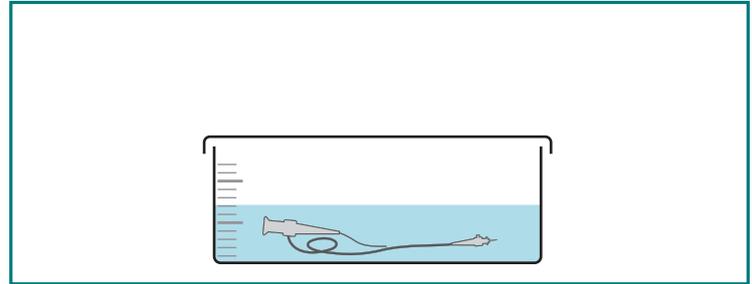


**2** Couvrir les bacs.

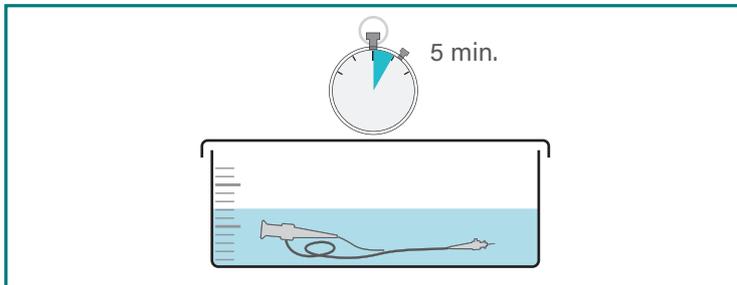

**3** Après le temps de contact de 5 minutes, rincer soigneusement avec de l'eau stérile ou filtrée avant réutilisation. Ne pas dépasser le temps de contact recommandé.

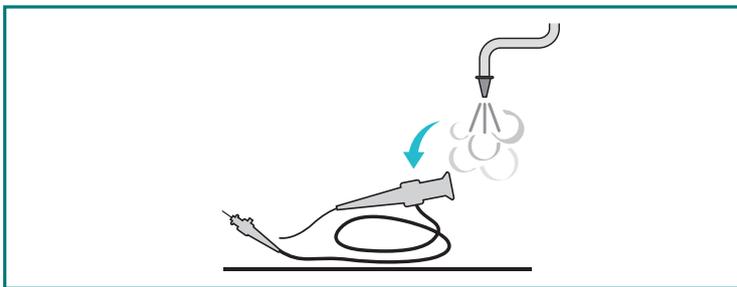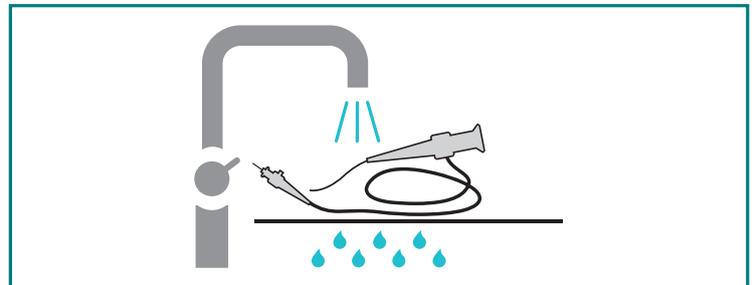

**4** Avant stockage, sécher le dispositif à l'air médical sur une surface sèche préalablement nettoyée.

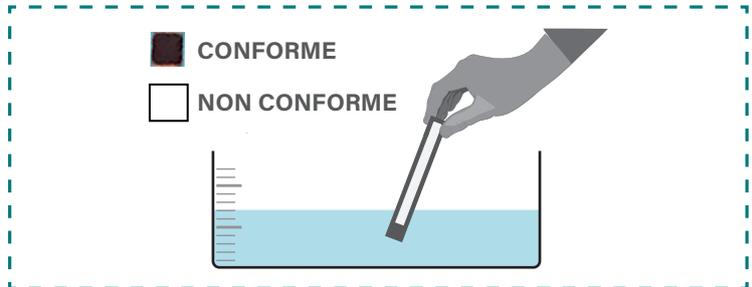

1. Immerger la languette test pendant 1 seconde environ dans exeol PA.  
2. Secouer immédiatement et légèrement la bandelette pour éliminer l'excédent de liquide.  
3. Exactement 10 secondes après le retrait de exeol PA, observer la couleur de la zone test et la comparer aux visuels de référence ci-dessus. Ignorer tout changement de couleur après 15 secondes.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette, la FDS et les informations concernant le produit. EPI :



UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ  
**exeol**  
UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible sur [www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)



Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France  
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Bioxal  
ZI Sud Secteur A,  
Route des Varennes  
71100 Chalon sur Saône, France.

Marquage CE obtenu en 2023  
DM classe IIb

CE 0297

