

# exeol GTA 2%

## Désinfectant de haut niveau

- Solution prête à l'emploi à base de glutaraldéhyde pour la désinfection finale par immersion des dispositifs médicaux thermosensibles semi-critiques et critiques réutilisables invasifs et non invasifs préalablement nettoyés.




INSTRUMENTS  
ENDOSCOPIE


Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.  
 Pour la France: **exeol GTA 2%** est utilisable pendant 7 jours maximum.  
 Pour l'international: **exeol GTA 2%** est utilisable pendant 30 jours maximum.  
**Contrôler régulièrement la validité du bain avec les bandelettes de contrôle exeol strips GTA 2%.**  
 Avant l'utilisation de **exeol GTA 2%**, réaliser un pré-nettoyage ou un nettoyage mécanique complet et un rinçage intermédiaire des dispositifs médicaux à traiter.




### Bidon 5L

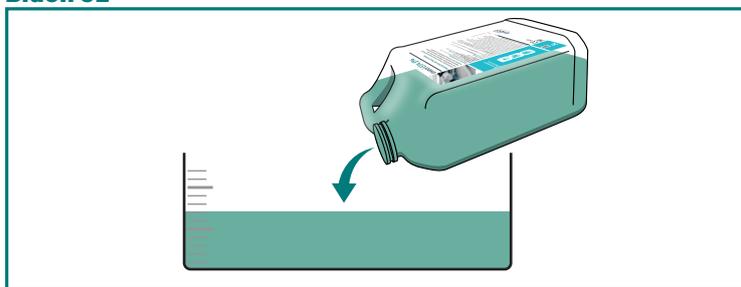


- 1** Lors de la première utilisation, retirer la bague d'invulnérabilité puis dévisser le bouchon. Dévisser le bouchon du bidon et transvaser le contenu dans le bac. Refermer le bidon après utilisation.

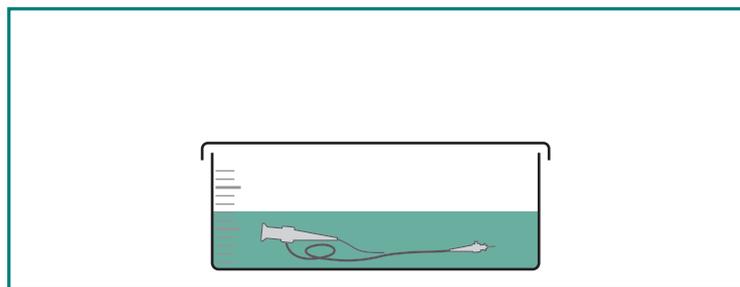


- 2** Placer les dispositifs médicaux ouverts et démontés dans la solution en s'assurant qu'ils soient complètement immergés. Assurer l'irrigation des canaux si présents. Couvrir le bac.

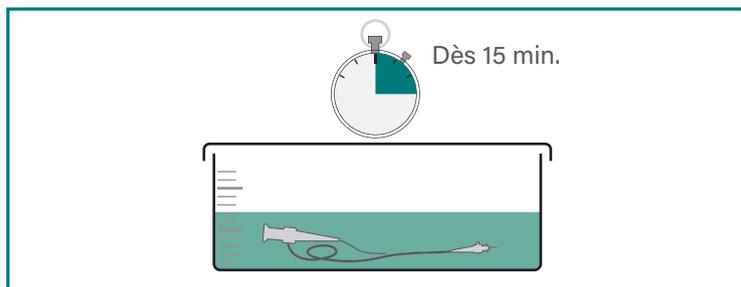


- 3** Temps de contact: dès 15 min. selon le spectre d'activité recherché.

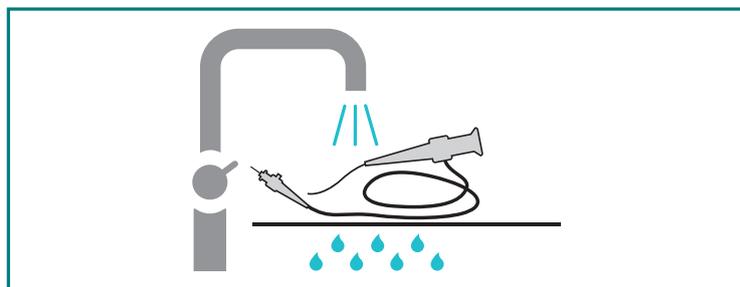

- 4** Rincer soigneusement avec de l'eau stérile ou filtrée (0,2µm) avant réutilisation.

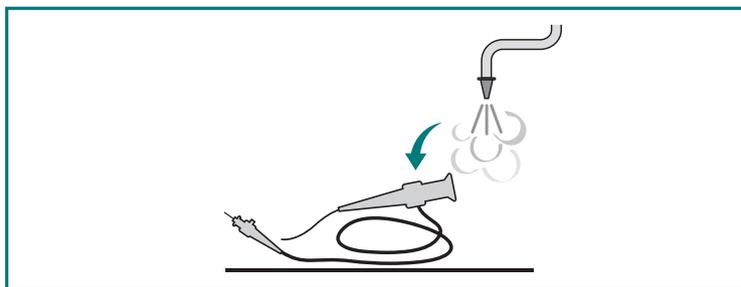

- 5** Avant stockage, sécher les dispositifs à l'air médical sur une surface sèche préalablement nettoyée.

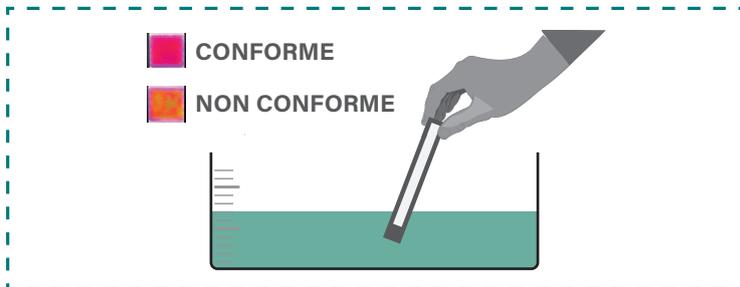

- 1.** Immerger la bandelette de contrôle **exeol strips GTA 2%** pendant 1 seconde dans **exeol GTA 2%**.
  - 2.** Secouer immédiatement et légèrement la bandelette pour éliminer l'excédent de liquide.
  - 3.** Exactement 15 secondes après le retrait de **exeol GTA 2%**, observer la couleur de la zone test et la comparer aux visuels de référence ci-dessus.
- La bandelette **exeol strips GTA 2%** est sensible et spécifique à 100%, si le mode d'emploi est respecté.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. EPI :



Dossier produit disponible sur [www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Sodel  
 190 rue René Barthélemy  
 14100 Lisieux, France.  
 TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Marquage CE obtenu en 2023  
 DM classe IIb



FABRIQUÉ EN FRANCE

