



exeol clean matic

Détergent alcalin non moussant

► Solution concentrée pour le nettoyage en LDI ou tunnel de lavage des instruments chirurgicaux et accessoires, avant stérilisation.

- Performance de détergence validée sur les principaux indicateurs de nettoyage du marché (ex. : TOSI® et Browne®).
- Sans EDTA, sans NTA, sans phosphate.
- Compatible avec les aciers inoxydables selon la norme NF S94-402-1 (Mai 2004) et les matériaux non sensibles aux pH légèrement alcalins (pH 10).



LAVEURS
DÉSINFECTEURS
D'INSTRUMENTS
ET TUNNELS

PRODUIT

PERFORMANCE
DE
DÉTERGENCE

FORMULE
CONCENTRÉE

DÈS
4 MIN.

BONNES PRATIQUES



Mode d'emploi

exeol clean matic est une solution concentrée.

Lors de la première utilisation, avant de dévisser le bouchon, retirer la bague d'inviolabilité. Installer le bidon à l'emplacement prévu dans ou près du laveur-désinfecteur, et y plonger la canne de prélèvement pour la phase de lavage. En cas de changement de produit dans le laveur-désinfecteur, purger et rincer au préalable les tuyaux et le système de dosage avec de l'eau claire. Ne pas recycler la solution de lavage.

exeol clean matic doit être injecté lors de la phase de lavage.

Dilution comprise entre 0,3% (3mL/L) et 0,5% (5mL/L) à une température de 55°C dès 4 minutes. La dose optimale dépend des spécificités du site (qualité d'eau, type de laveur-désinfecteur et de matériel à traiter, niveau de salissures).

Utiliser ensuite **exeol rinse matic** pour la phase de désinfection thermique (rinçage final).

Respecter les instructions des fabricants des dispositifs médicaux à traiter et du laveur-désinfecteur.

Composition	Caractéristiques	Précautions
Agents de surface anioniques et non ioniques, agents séquestrants et excipients.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pH pur : 9,7 - 10,5 ▪ pH à 0,5% : 9,5 - 10,0 ▪ Parfum : Non parfumé ▪ Couleur : Incolore à jaune brun 	Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : HWVG-SAD7-KV26-MM4Q



DANGER

Présentations commerciales

- Carton 2 x 5L : EXS0068Z1
- Bidon 10L : EXS0069Z1

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

DM classe I



Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr