



LAVEURS DÉSINFECTEURS D'INSTRUMENTS ET TUNNELS

+ PRODUIT

ENZYMATIQUE

FORMULE
CONCENTRÉE

DÈS
2 MIN.

BONNES PRATIQUES



Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr

exeol clean matic E

Détergent enzymatique non moussant

► Solution enzymatique concentrée pour le nettoyage en LDI ou tunnel de lavage des instruments chirurgicaux et accessoires, avant stérilisation.

- **Formule enzymatique.**
- **Performance de détergence validée sur les principaux indicateurs de nettoyage du marché (ex. : TOSI®, Browne®, STF Load Check®).**
- **Sans EDTA, sans NTA, sans phosphate.**
- **Compatible avec la majorité des matériaux dont les aciers inoxydables selon la norme NF S94-402-1 (mai 2004).**



Mode d'emploi

exeol clean matic E est une solution concentrée.

Lors de la première utilisation, avant de dévisser le bouchon, retirer la bague d'inviolabilité. Installer le bidon à l'emplacement prévu dans ou près du laveur-désinfecteur, et y plonger la canne de prélèvement pour la phase de lavage. En cas de changement de produit dans le laveur-désinfecteur, purger et rincer au préalable les tuyaux et le système de dosage avec de l'eau claire. Ne pas recycler la solution de lavage.

exeol clean matic E doit être injecté lors de la phase de lavage.

Dilution comprise entre 0,2% (2mL/L) et 0,5% (5mL/L) à une température de 55°C dès 2 minutes. La dose optimale dépend des spécificités du site (qualité d'eau, type de laveur-désinfecteur et matériel à traiter, niveau de salissures).

Utiliser ensuite **exeol rinse matic** pour la phase de désinfection thermique (rinçage final).

Respecter les instructions des fabricants des dispositifs médicaux à traiter et du laveur-désinfecteur.

Composition	Caractéristiques	Précautions
Agents de surface non ioniques et cationiques, agents séquestrants, enzymes et excipients.	▪ pH pur : 8,5 - 9,5 ▪ pH à 0,5% : 9,5 - 10,5 ▪ Parfum : Non parfumé ▪ Couleur : Jaune	Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : 8P59-K0EX-C009-N0PD



ATTENTION

Présentations commerciales

- Carton 2 x 5L : EXS0070Z1
- Bidon 10L : EXS0076Z1

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

DM classe I



Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL