

exeol clean 4E

Détergent multi-enzymatique

► Solution enzymatique concentrée à diluer :


- pour le nettoyage par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.
- pour le nettoyage en LDI ou tunnel de lavage des instruments chirurgicaux et accessoires, avant stérilisation.



INSTRUMENTS
ENDOSCOPIE


Avant utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.

Flacon 1 L doseur

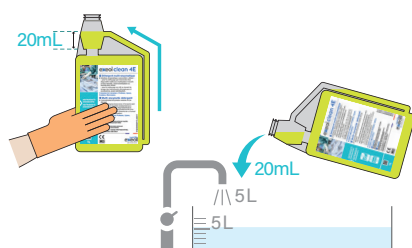

OU

Bidon 5 L

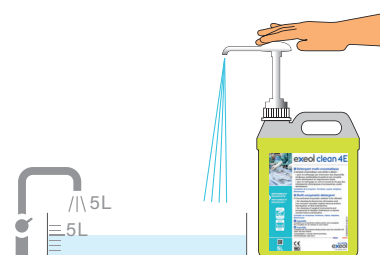


Enlever le bouchon et presser les flancs du flacon pour obtenir la dose souhaitée. Diluer la dose obtenue avec de l'eau à température ambiante : de 0,2% (2mL/L) à 0,5% (5mL/L). Refermer le flacon après utilisation.


Lors de la première utilisation retirer la bague d'invulnérabilité puis dévisser le bouchon. Fixer la pompe de 20 mL sur le bidon et l'amorcer. Ne pas utiliser la dose obtenue avant l'amorçage complet de la pompe. À l'aide de la pompe doseuse, diluer le concentré avec de l'eau à température ambiante : de 0,2% (2mL/L) à 0,5% (5mL/L).

La solution diluée et non utilisée peut être conservée en bac couvert pendant 72h.


Utilisation

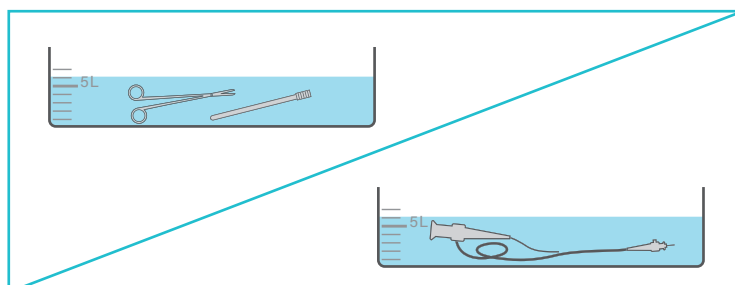

1 Placer les dispositifs médicaux ouverts et démontés dans la solution en s'assurant qu'ils soient complètement immergés.

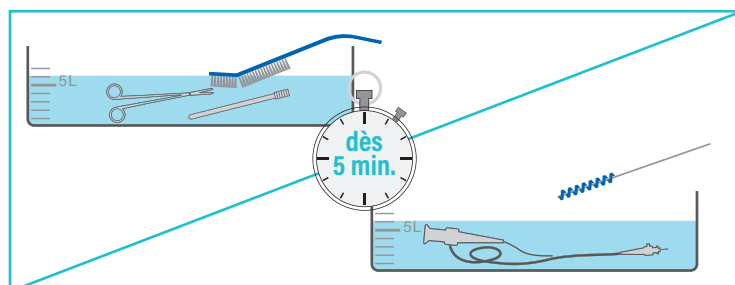

2 Nettoyer, brosser, écouvillonner et irriguer les canaux. Temps de contact : dès 5 min.

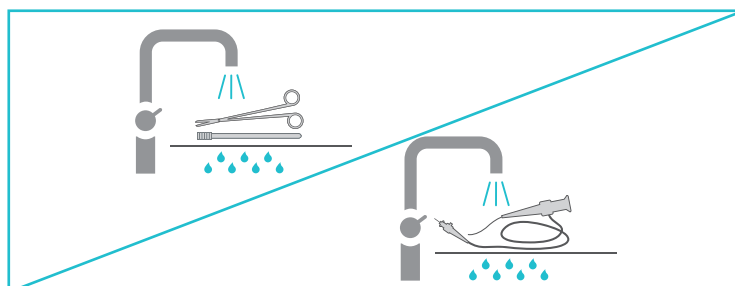

3 Retirer les dispositifs médicaux, les rincer soigneusement à l'eau.



Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. EPI :

La solution utilisée doit être renouvelée après chaque utilisation.
exeol clean 4E peut être utilisé en bac à ultrasons.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible
sur www.exeol.fr

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

Marqué CE en 2023
DM classe I

