

exeol rinse matic

Liquide de rinçage activateur de séchage

► Solution concentrée pour le rinçage final en LDI ou tunnel de lavage des instruments chirurgicaux et accessoires, avant stérilisation.

- Neutralise les résidus alcalins.
- Usage en eau adoucie ou déminéralisée.
- Compatible avec les aciers inoxydables selon la norme NF S94-402-1 (Mai 2004).



LAVEURS
DÉSINFECTEURS
D'INSTRUMENTS
ET TUNNELS

Mode d'emploi

exeol rinse matic est une solution concentrée.

• Bidons de 5L et 10L :

Lors de la première utilisation, avant de dévisser le bouchon, retirer la bague d'inviolabilité. Installer le bidon à l'emplacement prévu dans ou près du laveur-désinfecteur, et y plonger la canne de prélèvement pour la phase de rinçage.

En cas de changement de produit dans le laveur-désinfecteur, purger et rincer au préalable les tuyaux et le système de dosage avec de l'eau claire. Ne pas recycler la solution de rinçage.

exeol rinse matic doit être injecté lors de la phase de désinfection thermique (étape de rinçage final) après la phase de lavage avec un produit de la gamme **exeol** spécifique pour LDI.

Dilution comprise entre 0,03% (0,3mL/L) et 0,1% (1mL/L). La dose optimale dépend des spécificités du site (qualité d'eau, type de laveur-désinfecteur et de matériel à traiter).

Respecter les instructions des fabricants des dispositifs médicaux à traiter et du laveur-désinfecteur.

+ PRODUIT

UTILISATION
A FAIBLE DOSE

SANS
TRACE

BONNES PRATIQUES



LDI

Composition	Caractéristiques	Précautions
Acide organique, agent de surface anionique et agent de surface non ionique, conservateurs (BENZYL ALCOHOL), colorant.	<ul style="list-style-type: none">• pH pur : 2,1 - 3,1• pH à 0,03% : 6,2 - 7,2 (en eau déminéralisée)• pH à 0,1% : 5,0 - 6,0 (en eau déminéralisée)• Parfum : Non parfumé• Couleur : Vert	Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : U3C9-F0WX-N00F-AHDF

Présentations commerciales

- Carton 2 x 5L LDI : EXS0071
- Bidon 10L : EXS0077

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

DM classe I
Marqué CE en 2022



Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr