

Senator 3D Pro - Appareil de massage

Codes produits :

Référence 250062



caractéristiques du produit :

Type d'appareil: Autre appareil de massage

Longueur: 34 cm

Largeur: 16,5 cm

Hauteur: 13 cm

Poids: 1,6 kg

Description brève du produit :

Le Senator 3D Pro est un appareil de massage pour toutes les parties du corps humain. Sa haute efficacité et ses vibrations multi directionnelles permettent de réaliser un excellent massage. Le Senators 3D n'agit pas uniquement par vibrations horizontales, mais aussi par vibrations verticales.

Description du produit :

Le **Senator 3D Pro** est un appareil de massage haut de gamme, pour toutes les parties du corps humain. Sa haute efficacité et ses vibrations multi directionnelles permettent de réaliser un excellent massage. Le Senators 3D n'agit pas uniquement par vibrations horizontales, mais aussi par vibrations verticales. Ainsi, les vibrations sont appliquées dans les trois dimensions, permettant un massage des parties profondes des tissus et du corps.

Un outil tridimensionnel

La fonction unique de massage tridimensionnel du Senator 3D Pro effectue des vibrations horizontales et des impacts verticaux. Il procure des effets de massage en longueur, en largeur et en profondeur. L'effet tridimensionnel pénètre profondément les couches de tissu. Les stimulations activatrices influencent le corps et les parties du tissu.

Des caractéristiques ergonomiques

Le Senator 3D Pro possède des caractéristiques ergonomiques et une répartition du poids extraordinaire. Cet appareil portatif possède une large surface et un faible poids, permettant d'effectuer des massages de manière plus pratique.

Un appareil de massage à grande surface

L'appareil de massage à grande surface Senator 3D Pro est un appareil très puissant. Des oscillations horizontales et verticales sont émises en succession rapide. L'élasticité des tissus entraîne à son tour des vibrations de résonance. Cet appareil de massage à grande surface est facile à manipuler et permet d'atteindre les couches tissulaires les plus profondes. Il permet de détendre les muscles, les tendons et de redresser les tissus efficacement.

La circulation sanguine, ainsi que le métabolisme sont stimulés. Il favorise la désintoxication et permet de rester en bonne santé. Mais le Senator 3D Pro n'est pas bénéfique uniquement pour apaiser les muscles, puisque les fortes oscillations sont transmises au squelette et aux poumons.

Une plaque légèrement incurvée

La plaque de base légèrement incurvée de l'appareil vous permet d'effectuer la grande majorité des techniques de massage. La plaque est volontairement incurvée, afin qu'elle ne heurte pas les omoplates, ce qui permet une protection maximale de vos patients.

Les avantages du Senator 3D Pro

- Massage puissant et pénétrant
- Massage complet du corps sur une grande surface
- Moteur haute performance sans entretien
- 2 vitesses de vibration disponibles : 110 et 130 W
- Dispose d'un système de refroidissement optimal
- Livré en mallette avec un patin caoutchouc lisse et un patin brosse plastique
- Made in Germany

Le Senator 3D Pro est livré avec :

- Un sac de rangement en nylon
- Une brosse d'hyperhémitisation en plastique
- Un attachement de tête en caoutchouc mousse, lisse

Les conseils d'utilisation

Le massage tridimensionnel doit être effectué sur des zones individuelles du corps, entre 1 minute (par exemple les pieds) et 4 minutes (par exemple le massage du dos et de la nuque) afin de détendre les muscles et de stimuler la circulation sanguine. En un quart d'heure, vous pouvez traiter convenablement toutes les zones. De cette manière, les muscles se détendent et votre patient ressentira l'effet apaisant. Il peut être utilisé sur l'ensemble du corps. Le dos, le haut du corps, le cou, les bras, les jambes et les pieds de vos patients se détendent grâce au Senator 3D Pro.

Le système de refroidissement amélioré empêche le moteur de surchauffer, ce qui vous permet d'effectuer plusieurs massages par jour.

La tête en caoutchouc mousse amortit les vibrations de la plaque de base et est recommandée pour tous les massages des zones sensibles. La brosse d'hyperhémitisation est utilisée pour les massages légers et stimulants.

Attributs du produit :