

FICHE TECHNIQUE

3M™ Cavilon™ Advanced **Film protecteur cutané**

Description du produit et indications :

La protection cutanée 3M™ Cavilon™ Advanced est une solution à base de cyanoacrylate polymérisé conçue pour couvrir et protéger la peau intacte ou lésée. Lors de son application sur la peau, le liquide sèche rapidement pour former un film protecteur de longue durée, résistant durablement à l'eau. Cette solution est élastomérique, adhère aux contours de la peau et forme un film uniforme. Ce film est transparent et possède une bonne perméabilité à l'oxygène et à la vapeur d'eau. Le cyanoacrylate polymérisé est dilué dans un solvant non irritant. Le film est incolore, non-cytotoxique et limite le potentiel de dermatites. Le film adhère aux surfaces cutanées sèches, humides ou mouillées (c.à.d. perte de peau du second degré) et reste intact dans des conditions d'exposition.

Contre-indications :

La protection cutanée Cavilon™ Advanced NE DOIT PAS être utilisée :

- En cas d'allergie connue à un composant ;
- Chez l'enfant né avant le terme de 37 mois ;
- Comme pansement de soin pour les plaies profondes
- Dans ou autour des yeux

Référence du produit :

5050G - Film protecteur cutané avancé 3M™ Cavilon™



Composition :

hexaméthylsiloxane, tétrapolymère acrylique, 2-cyanoacrylate d'octyle

Conditionnement : 20 applicateurs par Carton

Biocompatibilité :

Le produit est conforme aux normes des évaluations biologiques ISO-10993 :

ISO-10993-1:2009, Partie 1: Evaluation et tests

ISO 10993-5:2009, Partie 5: tests in vitro pour cytotoxicité

ISO 10993-10:2010, Partie 10: Tests d'irritation et sensibilisation

ISO 10993-11:2006, Partie 11: Tests t pour cytotoxicité

ISO 10993-3:2014, Partie 3: Tests pour génotoxicité, carcinogénicité

Classification du produit : Dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE

Marquage CE : Oui par Organisme notifié – Marquage CE 00493 délivré par BSI, 0086

Lieu de fabrication : U.S.A.

Autres informations :

Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, de phtalates (DEHP) ou de produit d'origine animale ou biologique

A usage unique

Danger, liquide et vapeur hautement inflammables

Stérilisation :

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène : l'applicateur est stérile si l'emballage est intact

Non stérile : solution non stérile

Condition de conservation :

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Stocker à l'écart des acides. Stocker à l'écart des agents oxydants.

Durée de vie : 2 ans

C 3SD- 000608 -Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée au risque et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champs de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



3M France

Marchés de la Santé

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy-Pontoise Cedex

N° Azur : 0 810 331 300

Fax : 01.30.31.85.51

Janvier 2018