



Pompe à venin spéciale « Piqûres et morsures »

■ Gamme Urgence & Accessoires

RÉFÉRENCE : POM 8118 VE

Gencod : 3760098254651



Dimensions de la boîte :
120 mm x 75 mm x 35 mm



Poids : 90 g

DESCRIPTION

Cette pompe est destinée à aspirer, de manière indolore et efficace, de multiples venins tel que ceux des frelons, abeilles, moustiques, guêpes, mais également des serpents.

Elle est à utiliser le plus rapidement possible, et n'a aucune contre-indications.

Elle peut être utilisée à toute personne quel qu'en soit l'âge.

Légère, elle peut être insérée dans une trousse de secours.

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

Choisir la ventouse la plus adaptée à la taille de la piqure et l'insérer au bout de la pompe

Tirer sur le piston pour amorcer la pompe

Poser la ventouse sur la piqure

Pousser à fond et de façon énergique le piston

Laisser agir entre 30 secondes et 2 minutes en fonction de la morsure

Pour enlever la pompe, soulever le piston

Nettoyer et désinfecter les ventouses avant de les ranger

CONTENANCE

Livrée avec 4 ventouses de différentes tailles

Fourni dans une boîte plastique et avec un mode d'emploi

Rapide Pratique Efficace Réutilisable

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.

Dispositif Médical de classe I, conforme au règlement européen 2017/745 soumis à obligation de traçabilité.