

NOTICE DE SÉCURITÉ

À LIRE AVANT MONTAGE ET UTILISATION

INFORMATIONS GENERALES

1 Généralités

1.1 Introduction Le présent manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la manipulation du produit.

Pour garantir une utilisation en toute sécurité du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation et respectez les instructions de sécurité.

La Tablette Française se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.

Avant de lire ce document, assurez-vous de disposer de la version la plus récente.

Cette version est disponible au format PDF sur le site Internet de La Tablette Française.

En cas d'incident grave avec le produit, vous devez en informer le fabricant et l'autorité compétente de votre pays.

1.2 Informations de garantie

Nous fournissons une garantie fabricant pour le produit, conformément à nos conditions générales de vente en vigueur dans les différents pays.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées qu'au fournisseur auprès duquel le produit a été obtenu.

1.3 Conformité

Nous n'utilisons que des matériaux et composants conformes au règlement REACH.

Ce produit porte le label CE

Nous nous efforçons en permanence de réduire au minimum notre impact sur l'environnement, à l'échelle locale et mondiale.

1.4 Durée de vie:

La durée de vie attendue de ce produit est de trois ans lorsqu'il est utilisé quotidiennement et dans le respect des consignes de sécurité, des intervalles de maintenance et avec une utilisation correcte, comme indiqué dans le présent manuel. La durée de vie effective peut varier en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation.

1.5 Limitation de responsabilité

La Tablette Française décline toute responsabilité en cas de dommages liés à :

- un non respect du manuel d'utilisation,
- une utilisation incorrecte,
- l'usure normale,
- un assemblage ou montage incorrect par l'acheteur ou des tiers,
- des modifications techniques,
- des modifications non autorisées et/ou l'utilisation de pièces de rechange inadaptées.

1.6 Nettoyage

Des méthodes ou des liquides inappropriés risqueraient de blesser quelqu'un ou d'endommager le produit.

- Tous les désinfectants et agents de nettoyage utilisés doivent être efficaces, compatibles entre eux et protéger les surfaces qu'ils sont censés nettoyer.
- N'utilisez jamais d'agents de nettoyage corrosifs (alcalins, acides, etc.) ou abrasifs. Nous recommandons d'utiliser un agent de nettoyage ménager ordinaire, comme du liquide vaisselle, sauf indication contraire dans les instructions de nettoyage.
- N'utilisez jamais de solvant (diluants cellulose, acétone, etc.) qui modifie la structure du plastique.
- Procédez à un séchage complet du produit avant toute nouvelle utilisation.

Une désinfection et un nettoyage réguliers garantissent un bon fonctionnement, augmentent la durée de vie et permettent d'éviter toute contamination. Nettoyez et désinfectez le produit : –régulièrement lors de l'utilisation, –avant et après toute procédure d'entretien, –lorsqu'il a été en contact avec des fluides corporels, quels qu'ils soient, –avant de l'utiliser pour un nouvel utilisateur.

Température maximale de nettoyage: 60°C à la main.

1. Retirez les pièces amovibles.

2. Nettoyez le produit, essuyez toutes les surfaces généralement accessibles.

3. Essuyez les pièces avec un chiffon sec.

1.7 Mise au rebut

Préservez l'environnement en faisant recycler ce produit en fin de vie dans un centre de recyclage.

Désassemblez le produit et ses composants afin que les différents matériaux puissent être séparés et recyclés individuellement.

La mise au rebut et le recyclage des produits usagés et de l'emballage doivent respecter la législation et les règlements relatifs à la gestion des déchets de chaque pays.

Contactez votre organisme local de traitement des déchets pour plus d'informations.

MISE EN GARDE ET SÉCURITÉ

• Risque de dommage matériel ou de blessure grave si vous ne respectez pas la notice de montage fournie.

Une utilisation inadéquate de ce produit est susceptible d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.

• Si vous ne comprenez pas les avertissements, mises en garde ou instructions, contactez votre fournisseur avant d'essayer d'utiliser cet équipement.

• N'utilisez pas ce produit ni tout autre équipement disponible en option sans avoir lu et compris entièrement les présentes instructions et toute autre documentation d'instructions supplémentaire, telle que le manuel d'utilisation, les manuels de maintenance ou fiches d'instructions fournis avec ce produit ou l'équipement en option.



AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas le produit s'il est défectueux
 - N'effectuez aucune modification ou transformation non autorisées du produit.
 - Ne déplacez pas le produit lorsqu'il est chargé ou en cours d'utilisation.
 - Le produit ne doit pas être utilisé ni stocké à l'extérieur.
 - N'inclinez pas le produit.
 - Ne vous asseyez pas sur le produit.
 - Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement le produit.
 - Avant chaque utilisation, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé et qu'il est correctement monté.
 - Des pièces non adaptées ou qui ne sont pas d'origine peuvent affecter le fonctionnement et la sécurité du produit.
 - Utilisez uniquement les pièces d'origine du produit utilisé.
 - En cas de différences régionales, vous devez vous reporter au site Internet pour connaître les options disponibles ou contacter votre fournisseur.
 - Risques de chutes
 - Risque de coincement des doigts
 - Procédez avec précaution lors du montage.
- Risque d'endommagement du produit:
- Les pièces en plastique peuvent se fissurer lorsque les vis sont trop serrées.
 - Serrez les vis à la main.



LA TABLETTE FRANÇAISE®

THE FRENCH TAB



www.latablettefrancaise.fr