

FICHE TECHNIQUE : CHAISE ERGONOMIC AVEC PISTON

Composants et exécution du produit :

- la chaise est réalisée en structure fixe
- la chaise est équipée d'un système de propulsion

Dimensions : Largeur 580 (mm) Profondeur 545 (mm)

Hauteur 900 (mm)

- hauteur assise (mesurée à partir du sol) : 470 (mm)
- largeur entre bras : 495 (mm)

Poids de la chaise : 10 kg.

Conditionnement : le produit est livré monté, dans une boîte en carton 5 couches, protégé par un film polypropylène.

Caractéristiques de base :

La chaise est conçue pour une assise confortable et pour aider les personnes souffrant de certains problèmes médicaux, les personnes en convalescence et les personnes confrontées à des difficultés à cet égard, notamment en raison de l'âge avancé, à se lever.

Information produit :

Assise : Structure : en bois de hêtre massif sur laquelle est fixé un système de propulsion spécial (ensemble constitué d'un piston métallique, support en plastique assis recouvert de mousse polyuréthane de 4 cm d'épaisseur, HRR (haute résilience), densité 35 et dureté 36).

Dossier : Structure : intérieur composé de panneaux de fibres de bois pressés et renforcés pour le maintien, ainsi qu'une sangle élastique pour le confort.

Structure du cadre de la chaise :

La chaise est réalisée en bois de hêtre massif de la meilleure qualité, sans nœuds, cœur rouge, colorant. Elle possède un assemblage robuste avec des chevilles propres à la chaise, des creux et un adhésif de qualité supérieure. Les coins et mini-clous assurent une solidité et une durabilité supplémentaires.

Les pieds avant sont pourvus de patins en plastique pour éviter tout contact avec l'eau et pour protéger le sol. Les pieds arrière sont pourvus de manchons en caoutchouc pour éviter que le siège ne glisse vers l'arrière et pour augmenter sa stabilité.

Accessoire chaise : système de propulsion qui facilite une levée plus rapide du siège, atténuant ainsi les difficultés rencontrées pour se lever.

Finitions : Structure d'assise de différentes couleurs, finie avec vernis à base d'eau.

Revêtement : tissu easy clean.

Poids supporté : 190 kg.

Utilisation – stockage - conservation :

La chaise est conçue pour un usage domestique. Le stockage se fait dans un espace protégé de la lumière directe du soleil. La chaise en bois est conservée dans des pièces avec des températures comprises entre 12 et 24 degrés Celsius et une humidité de 30 à 60 %.

La chaise en bois se nettoie avec un chiffon doux et sec, pour la partie inférieure du produit utiliser un chiffon humide puis sec. La chaise doit être utilisée sur les 4 pieds, son utilisation uniquement sur les deux pieds avant ou arrière est interdite. Une chaise peut normalement supporter une personne pesant au maximum 190 kg. Pour protéger le sol, le client peut ajouter des protections en feutre autocollantes sur chaque pied (ceci n'est pas considéré comme une intervention sur le produit).

Contre-indications :

Ne pas utiliser de produits contenant de l'alcool, des agents chimiques ou abrasifs pour l'entretien, ne pas nettoyer à l'eau de javel, ne pas sécher au sèche-cheveux électrique, ne pas agir sur les surfaces avec des objets durs (couteau, cutter, clou...). Ne déplacez pas la chaise en la poussant ou en la tirant mais en la soulevant. Il est interdit de grimper avec les pieds sur l'assise du fauteuil. Le matériau de revêtement des chaises ne doit pas être mouillé, n'utilisez pas d'eau en grande quantité pour le nettoyage.

Ne placez pas d'objets chauds sur ou à proximité de la chaise. Ne placez pas le meuble en plein soleil et ne positionnez pas le fauteuil à proximité d'une source de chaleur (cheminées, radiateurs).



Garantie de conformité : 2 ans

Durée de vie moyenne : 10 ans