

Dermactyl A2B

Soin préventif des escarres chez les personnes alitées ou dépendantes.

Pour une peau mieux protégée contre le risque d'escarre.



Renforce la peau à l'intérieur

Protège des bactéries pathogènes extérieures

Dispositif médical de classe I

INDICATIONS

- Prévention de l'escarre
- Surveillance des points d'appui par effleurage
- Adultes
- Peaux sèches et fragilisées

TOLERANCE

Tolérance cutanée : **non irritant, non sensibilisant**
Hypoallergénique : formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : émulsion épaisse à effet quickbreak
 Couleur : blanche à beige clair.
 Odeur : neutre.
 Masse volumique à 20°C : 0,99 +/- 0,02 g/ml
 pH du produit pur à 20°C : 6,3 +/- 0,5

INGREDIENTS

AQUA (WATER), ETHYLHEXYL PALMITATE, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL DIPELARGONATE, SQUALANE, SODIUM POLYACRYLATE, SUCROSE STEARATE, POLYMETHYL METHACRYLATE PECTIN, TETRASODIUM EDTA, MALTODEXTRIN, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE) FLOWER EXTRACT, SILICA

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

PROFESSIONNEL

COMPOSITION

Émulsion composée de glycérine végétale, de phytosqualane, et d'une association synergique de pectine de pomme et d'hydrocotyle asiatique (brevet Rivaprotect®).



PROPRIETES

Caractéristiques	Avantages	Bénéfice
Formule enrichie en glycérine végétale et en phytosqualane	Hydrate la peau dès la 1ère application Maintien l'hydratation et prévient du dessèchement cutané à long terme	Renforce la peau à l'intérieur
	Améliore les propriétés biomécaniques de la peau : renforce l'extensibilité et la tonicité cutanée**	
Association brevetée de pectine de pomme et d'hydrocotyle asiatique	Empêche l'adhésion des bactéries exogènes (étude sur <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i>). Protège le microbiote naturel.	Protège de l'adhésion des bactéries pathogènes extérieures
Emulsion quickbreak	L'émulsion fond et se transforme en huile pour un glissement facilité	Facilite le geste d'effleurage

* hydratation des couches supérieures de l'épiderme, mesures cornéométriques sur 11 volontaires

** Résultats d'un tests d'usage sous contrôle dermatologique avec mesures instrumentales et scorages cliniques : étude sur la zone trochantérienne sur 15 à 20 sujets de plus de 60 ans ayant la peau sèche ; 3 applications par jour pendant 21 jours

CONSEILS D'UTILISATION

DERMACTYL A2B s'utilise dans le cadre d'un protocole global de prévention de l'escarre.

Appliquer en fine couche de DERMACTYL A2B sur la peau de la zone à risque. La quantité de produit à appliquer dépend de la largeur de la zone à effleurer et de l'état cutané. Effectuer des mouvements circulaires légers avec la pulpe des doigts en répartissant de façon homogène le produit. DERMACTYL A2B va changer de texture pendant l'effleurage, passant d'émulsion à huile et facilitant ainsi le glissement des doigts sur la peau.

Renouveler l'opération sur chaque zone à risque 2 à 4 fois par jour.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur une peau lésée : zones présentant des lésions cutanées (exemple : dermatoses infectieuses), zones cutanées inflammatoires, érythème persistant à la pression.

Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.

Usage externe. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux et les muqueuses.

Condition de conservation : entre 15 et 30°C. Peut supporter des pics de chaleurs de quelques jours jusqu'à 40°C sans être endommagé.

PRESENTATION

Présentation	Code	Conditionnement	EAN
--------------	------	-----------------	-----

Tube 30 ml	65769	Carton de 12 tubes	3361370657698
------------	-------	--------------------	---------------

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée de conservation : 18 mois

Statut : Dispositif Médical de classe I

PAO : 6 mois

Nomenclature Cladimed : F56AZ prévention anti-escarre

Nouveau site e-commerce : **RIVADIS PRO.com**

Laboratoire Rivadis - Impasse du Petit Rosé - ZI - 79100 LOUZY - FRANCE
santemedicaleclients@labo-rivadis.fr

Tel. 05 49 68 99 70
Fax 05 49 68 19 45