

REFERENCE LCM	DESIGNATION
1605636200	FAUTEUIL RELEVEUR HOLEN 2 DARK GREY
1605636020	FAUTEUIL RELEVEUR HOLEN 2 MURBLE GREY
1605636370	FAUTEUIL RELEVEUR HOLEN 2 TAUPE

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE La construction de qualité d'un mécanisme de levage utilisant les dernières technologies, apporte un confort reposant à ceux qui ont besoin d'aide pour s'asseoir et se tenir debout. L'ajout d'un mécanisme de fauteuil inclinable permet également au moteur de levage d'incliner le fauteuil dans la position de confort souhaitée. C'est une bénédiction pour tous, en particulier pour les personnes âgées. Cette chaise de conception unique avec repose-pieds intégré offre un soutien total dans toutes ses positions variées, et la commande manuelle à commande simple peut être utilisée pour changer de position en douceur et facilement. Pour un confort total, nos fauteuils relevables et inclinables entièrement réglables vous apporteront un soutien total, que vous soyez en train de vous étirer, de vous asseoir ou simplement de vous allonger et de vous détendre.

Instructions d'utilisation et mises en garde

- Avant de brancher votre fauteuil releveur électrique à l'alimentation électrique, veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation, le cordon de la télécommande et la télécommande sont libres d'action, et que le cordon d'alimentation et le cordon de la télécommande ne se sont pas enroulés autour du mécanisme pendant transport .
- Après avoir branché l'alimentation électrique au mur, le fauteuil est prêt à être utilisé. Il n'y a pas d'autres boutons « ON » ou « POWER ».
- Pour relever le fauteuil, veuillez appuyer sur le bouton supérieur de la télécommande. La chaise se soulèvera du sol, s'inclinera vers l'avant et s'arrêtera à une hauteur définie. Lorsque le fauteuil se lève et s'incline vers l'avant, l'utilisateur doit marcher solidement sur le sol et faire attention de ne pas glisser du fauteuil.
- Pour abaisser le fauteuil, veuillez appuyer sur le bouton inférieur de la télécommande. La chaise s'abaissera jusqu'au sol.

Veuillez vous assurer de ne laisser aucune personne ou animal sous la chaise lors de l'utilisation. Pour incliner le fauteuil , lorsque le fauteuil est en position abaissée , veuillez appuyer sur le bouton inférieur de la télécommande . Le repose-pieds s'allongera. Le dossier de la chaise s'inclinera et veuillez réserver suffisamment d'espace pour vous allonger. Gardez le doigt sur le bouton jusqu'à ce que la position d'inclinaison souhaitée soit atteinte. Pour fermer l'inclinaison, veuillez appuyer sur le bouton supérieur de la commande I jusqu'à ce que le repose-pieds revienne en position fermée. Méfiez-vous du repose-pieds pour serrer quoi que ce soit ou qui que ce soit lorsque le repose-pieds se ferme. Si vous continuez d'appuyer sur le bouton, le fauteuil se déplacera vers la position relevée . Lorsque le fauteuil s'arrête en position complètement relevée ou complètement inclinée, veuillez relâcher le bouton ou la surcharge peut couper l'alimentation prématurément. Le fauteuil peut s'arrêter à n'importe quelle position en relâchant le bouton . Capacité de levage Le cadre et la structure du fauteuil releveur ont été renforcés pour assurer une résistance maximale et une conduite stable.

Le fauteuil peut soulever une charge MAXIMALE de 130 kg.

Consignes de sécurité importantes Le moteur est protégé contre les surcharges thermiques. Si le fauteuil est surutilisé pendant un court laps de temps, il s'éteindra automatiquement et vous devrez

attendre que le moteur refroidisse avant de continuer à l'utiliser. Cela élimine tout risque de surchauffe et dissuade les enfants de jouer, mais n'oubliez pas que le fauteuil releveur n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme jouet par les enfants. La responsabilité ne sera pas acceptée en cas de mauvaise manipulation ou d'abus du client.

Spécifications du moteur La tension d'alimentation du moteur est de 90-240 volts CA, 50 HZ. Un transformateur externe au moteur réduit la tension du moteur à 24 volts DC.

Avertissements Cette chaise est adaptée pour une utilisation par des personnes ne dépassant pas 130 kg. Ne placez jamais les cordons d'alimentation sur les cordons d'alimentation et ne les faites pénétrer à l'intérieur de ce fauteuil à aucun moment. Ne laissez pas les enfants jouer sur ce meuble mécanisé. Assurez-vous que toutes les personnes et les animaux sont éloignés de la chaise lors de l'utilisation.

Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec la télécommande.

INSTALL DRAWING

