



TECHNIQUE DE POSE

amd Form

Protection anatomique



Pour les patients en position debout

1.



- Déplier la protection et former le godet

2.



- Installer le slip filet au-dessus du genou.
- Positionner le change à l'entrejambe de l'avant vers l'arrière.

3.



- Centrer le change sur l'arrière en alignant la colonne vertébrale entre les 2 repères de taille.
- Ajuster le change pour épouser entièrement le bas des fesses.

4.



- Remonter le slip de maintien avec une main en maintenant l'avant du change avec l'autre main.

5.



- Ajuster le change sur la taille en prenant soin de l'adapter dans les plis de l'aîne

6.




- Chez la femme : le change à l'avant est positionné au niveau du pubis.

7.




- Chez l'homme : le change est positionné au même niveau avant/arrière.

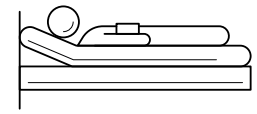

Pour les patients en position allongée

1.

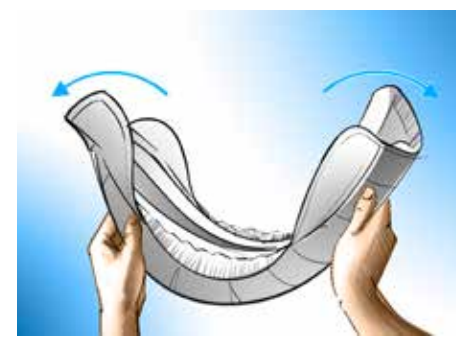

- Déplier la protection et former le godet

2.




- Installer le slip filet au-dessus du genou.
- Tourner la personne sur le côté.

3.



- Positionner le change à l'entrejambe de l'avant vers l'arrière.

4.

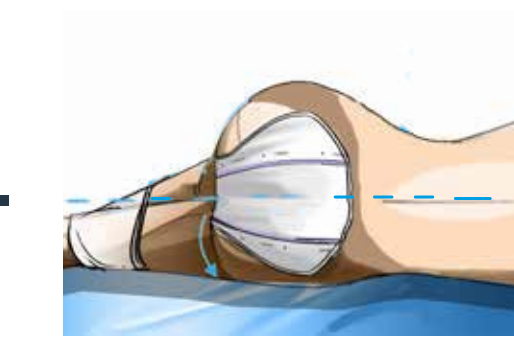

- Centrer le change sur l'arrière en alignant la colonne vertébrale entre les 2 repères de taille.
- Ajuster le change pour épouser entièrement le bas des fesses.

5.




- Remonter le slip de maintien sur le côté.

6.



- Repositionner la personne sur le dos.
- Remonter le slip de maintien sur l'autre côté
- Ajuster le change sur l'avant en prenant soin de l'adapter dans les plis de l'aîne.

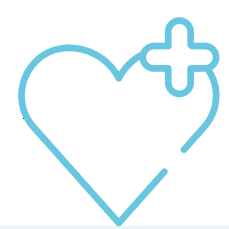

QUELQUES CONSEILS

01

NIVEAUX D'ABSORPTION

Système de gouttes remplies et de couleurs

Light	Super
Mini	Maxi
Normal	Maxi +
Extra	

02

SLIP DE MAINTIEN, CHOISIR LA BONNE TAILLE

amd Cotton fix



SLIP DE MAINTIEN LAVABLE

Taille	Tour de hanche	
S	75 - 95 cm	
M	85 - 105 cm	
L	95 - 115 cm	
XL	100 - 125 cm	
XXL	110 - 140 cm	
XXXL	130 - 175 cm	

03

PROTOCOLE DE CHANGE / 24 HEURES

- Matin Change à la toilette
- Après-midi Change si nécessaire
- Début de nuit Change
- Nuit Contrôle

04

LIRE LE TÉMOIN DE SATURATION ?

LOT02:721 1812AMD FORM MAXI

Changer la protection quand les chiffres commencent à s'effacer