

Pansements Leukoplast Strong - Assortiment de 20



Codes produits :

Référence 550079

caractéristiques du produit :

Quantité: 20 pansements

Coloris: Beige

Description brève du produit :

Pansements Leukoplast Strong – adhésion forte et imperméable pour protéger efficacement coupures et éraflures. Assure confort, respirabilité et absorption optimale. Assortiment de 20 pansements.

Description du produit :

Pansements Leukoplast Strong - Protection et adhésion optimales


Leukoplast Strong est un pansement imperméable hautement adhésif, conçu pour une utilisation à court terme sur les plaies mineures, coupures et éraflures. Fabriqué à partir d'un tissu flexible et respirant, il assure une protection fiable tout en garantissant un confort optimal. Sa compresse hautement absorbante permet de maintenir la plaie propre et sèche.

Les principaux avantages des pansements Laukoplast Strong

- **Haute adhérence** : reste bien en place, même en environnement humide.
- **Imperméable** : protège efficacement contre l'eau et les impuretés.
- **Tissu flexible et respirant** : offre un confort optimal tout en permettant à la peau de respirer.
- **Compresse hautement absorbante** : absorbe efficacement les exsudats pour maintenir la plaie propre.
- **Utilisation à court terme** : idéal pour les blessures superficielles du quotidien.

Conseils d'utilisation

Les pansements Leukoplast Strong sont destinés à la protection des petites blessures, coupures et éraflures. Avant application, veillez à nettoyer et sécher la plaie pour assurer une adhérence optimale. Changez le pansement régulièrement et surveillez l'évolution de la plaie. En cas de réaction cutanée ou d'infection, cessez l'utilisation et consultez un professionnel de santé.

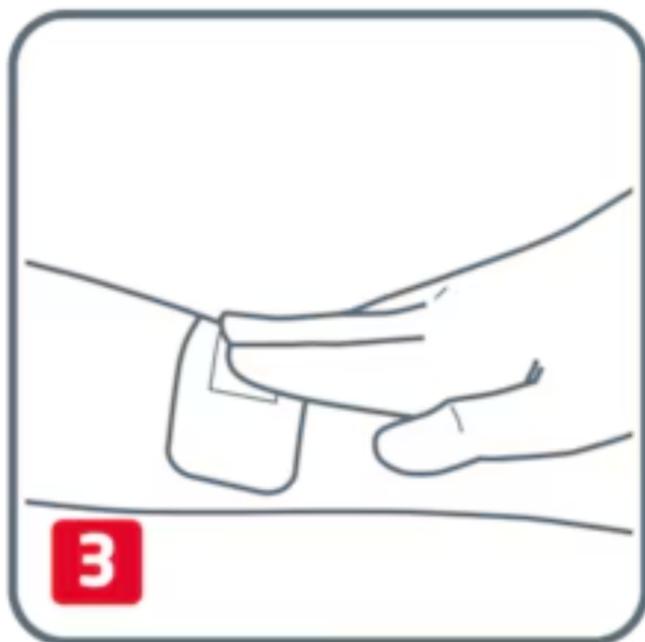

1. Retirer la pellicule de protection :

Tenir la bande dans une main et enlever la pellicule de protection supérieure avec le pouce et l'index de l'autre main.

2. Appliquer et retirer la seconde pellicule de protection :

Placer la compresse au centre de la plaie. S'assurer de toucher uniquement la pellicule de protection et le dos du pansement adhésif et de ne jamais toucher la compresse qui sera en contact avec la plaie. Retirer la pellicule de protection.

3. Lisser et appuyer :


Lisser le pansement de manière à ce que ce dernier adhère uniformément. Appliquer uniquement une légère pression

et éviter toute tension. Pour accroître la force d'adhésion, on peut réchauffer le timbre entre les paumes des deux mains avant de l'appliquer.

Assortiment de pansements

Cet assortiment de 20 pansements Laukoplast Strong est composé de 4 modèles différents, pour traiter les différentes parties du corps. Voici un exemple d'application pour les blessures de la main.

- Phalange
- Bout de doigt
- Jointures

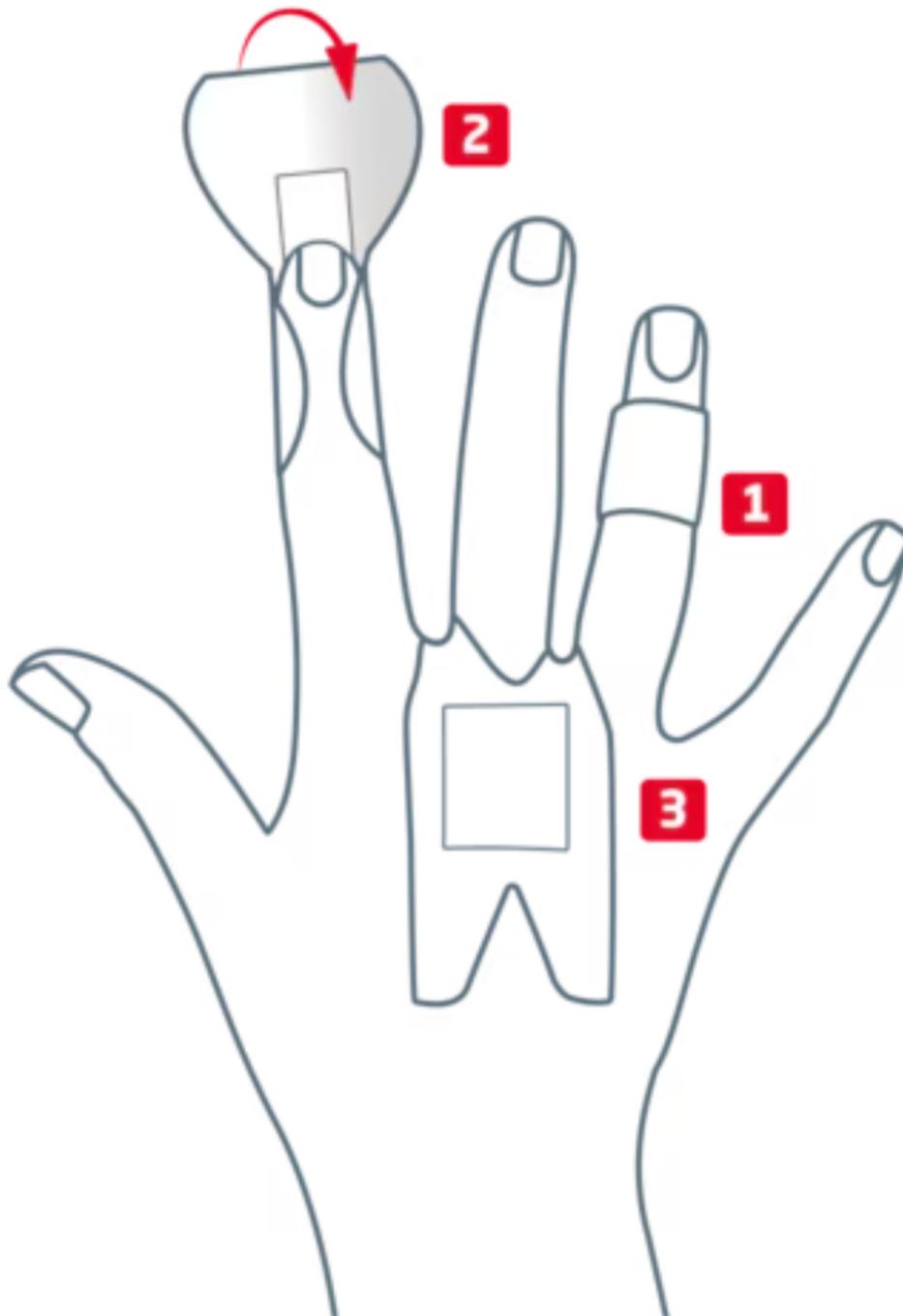


Indications

- Protection des plaies mineures.
- Coupures et éraflures.
- Utilisation quotidienne sur peau propre et sèche.


Les caractéristiques des pansements Leukoplast Strong

- Matière : tissu flexible et respirant.
- Quantité : 20 pansements.
- Coloris : beige.


Dimensions des pansements

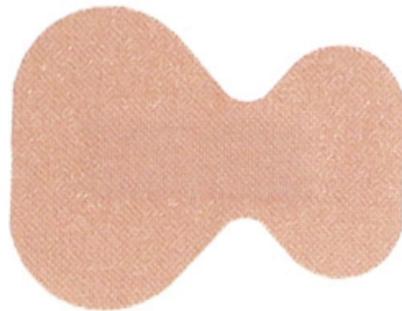

50 X 63 MM

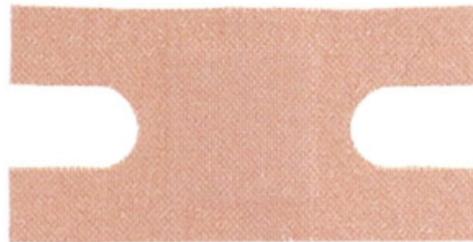

38 X 75 MM

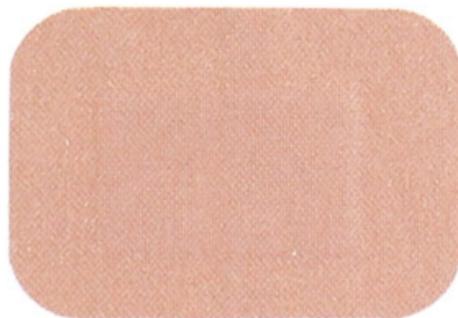

50 X 72 MM



22 X 38 MM

Attributs du produit :