

**LOMATUELL® Pro****Pansement interface gélifiant**

REF : 30870, 220001, 220002, 400310, 136875, 400311, 400312

**PRODUIT :**

REF 30870, Lomatuell® Pro, Pansement interface gélifiant, Stérile, 5 cm x 5 cm, référence hôpital,  
REF 220001, Lomatuell® Pro, Pansement interface gélifiant, Stérile, 15 cm x 20 cm, référence hôpital,  
REF 220002, Lomatuell® Pro, Pansement interface gélifiant, Stérile, 15 cm x 30 cm, référence hôpital,

REF 400310, Lomatuell® Pro, Pansement interface gélifiant, Stérile, 5 cm x 5 cm, référence officine,  
REF 136875, Lomatuell® Pro, Pansement interface gélifiant, Stérile, 10 cm x 12 cm, référence officine,  
REF 400311, Lomatuell® Pro, Pansement interface gélifiant, Stérile, 15 cm x 20 cm, référence officine,  
REF 400312, Lomatuell® Pro, Pansement interface gélifiant, Stérile, 15 cm x 30 cm. référence officine.

**COMPOSITION :**

Tulle en polyester (polyéthylène téréphtalate - PET), imprégnée de :

- Vaseline,
- Huile blanche de qualité médicale (ou paraffine liquide),
- Carboxyméthyle cellulose de sodium (CMC),
- Antioxydant,
- Caoutchouc de synthèse.

Recouvert sur les 2 faces de papier PET siliconé.

**CARACTERISTIQUES :**

Pansement non-adhérent de couleur blanche, flexible, formant un gel au contact des exsudats, facilitant leur drainage ainsi que le processus de cicatrisation.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

**PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :**

1 pansement entre 2 feuilles de papier PET sous sachet pelable individuel.

Lomatuell® Pro, Pansement interface					
REF	Code GTIN	Code LPPR	Dimensions	Conditionnement de base	Carton Standard
30870	4021447546940		5 cm x 5 cm	10 pansements	360 pansements
220001	4063591264158		15 cm x 20 cm	5 pansements	50 pansements
220002	4063591264189		15 cm x 30 cm	5 pansements	55 pansements
400310	4068225311956	1310470	5 cm x 5 cm	10 pansements	360 pansements
136875	4056649523758	1341594	10 cm x 12 cm	16 pansements	320 pansements
400311	4068225311918	1367004	15 cm x 20 cm	5 pansements	50 pansements
400312	4068225311994	1345445	15 cm x 30 cm	5 pansements	55 pansements

**INDICATIONS :**

Lomatuell® Pro est utilisé pour protéger les plaies superficielles et convient dans le traitement des plaies aiguës (dont lacérations, coupures, écorchures, brûlures au second degré), des plaies post-chirurgicales (dont plaies chirurgicales en cours de cicatrisation secondaire et sites donneurs de greffe), et des plaies chroniques (dont ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique et escarres).

**CONTRE- INDICATIONS :**

Allergie et/ ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit.

---

**MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Lomatuell® Pro est un produit à usage unique

Lomatuell® Pro est stérile tant que l'emballage n'est pas ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou s'il a été ouvert par inadvertance.

**Préparation :**

Avant d'appliquer Lomatuell® Pro, nettoyer soigneusement la plaie en la rinçant (par ex. avec une solution physiologique saline ou une solution de Ringer).

**Application :**

1- Ouvrir l'emballage stérile à l'endroit indiqué et retirer le produit dans des conditions stériles,

2- Retirer le film protecteur appliqué des deux côtés,

3- Appliquer Lomatuell® Pro en débordant d'environ 1 cm sur les bords de la plaie.

Pour adapter les dimensions du pansement à la plaie, le produit peut être découpé selon les besoins à l'aide de ciseaux stériles.

4- Pour les plaies fortement exsudatives, un pansement hautement absorbant est posé en tant que pansement secondaire.

Pour les plaies modérément à faiblement exsudatives, la pose d'une compresse en non-tissé ou de gaze est suffisante.

Pour favoriser un milieu de plaie chaud et humide et protéger la plaie des germes et des bactéries de l'extérieur, le pansement peut être fixé avec un film PU.

**Changement de pansement :**

L'intervalle de changement de pansement recommandé est en règle générale de 2 à 4 jours.

En fonction du type de plaie et du processus de cicatrisation, le pansement peut être laissé plus ou moins longtemps sur la plaie (max. 7 jours), après consultation du professionnel de santé en charge des soins.

---

**STERILISATION :**

Les pansements Lomatuell® Pro sont stérilisés par irradiation.

---

**CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans leur emballage d'origine, à plat, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) de la poussière et de l'humidité.

---

**VALIDITE DU PRODUIT :**

5 ans à partir de la date de fabrication si les conditions de stockage sont respectées.

---