

TALONNETTES PLATES SILICONE

Avec insert central



DOMAINE D'APPLICATION

Prévention, Rhumatologie.

INDICATIONS

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Épine calcanéenne.

CARACTÉRISTIQUES

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.
- Épaisseur de la talonnette : 5 mm, sans bords latéraux.
- Insert central.
- Lavable et réutilisable.

COMPOSITION

Gel Polymère.

TVA : 20%

LPPR : Non remboursé.

Prise de mesure : POINTURE Modèle gauche et droit				
Taille	Pointure	EAN 13	ACL 7	Référence
1	35 - 38	3401029455845	2945584	CP0621.PA1
2	39 - 42	3401029455906	2945590	CP0621.PA2
3	43 - 46	3401029456156	2945615	CP0621.PA3
4	47 - 50	3401029456217	2945621	CP0621.PA4

ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliaana Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
 Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com
 Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbetais, 35520 La Mézière (France).
 Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **TALONNETTES PLATES SILICONE** Avec insert central

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'at-telle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1 - Choisir la pointure appropriée.
- 2 - Mettre une talonnette à chaque pied, sauf avis contraire du médecin.
- 3 - Mettre la partie plate de la talonnette en contact avec la semelle de la chaussure et la forme anatomique en contact avec le pied.
- 4 - Il est recommandé d'utiliser des chaussures larges et des chaussettes.
- 5 - Il est possible que vous ayez besoin d'une période de 2 à 3 jours pour vous habituer à la talonnette, jusqu'à ce que son usage devienne agréable.

ENTRETIEN :

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement.
- Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas mettre au sèche-linge.
- Ne pas javelliser.
- Ne pas utiliser de détergent.
- Conserver le produit à température ambiante.

