

Cardiomate 3,6,12

- ECG 12 dérivations : 3, 6 ou 12 pistes en thermique selon modèle, et export 12 pistes en PDF
- Ecran couleur et batterie
- Fonctionnement rapide : bouton de mise en marche et bouton Start/stop
- Export des ECG (PC ou MAC) en PDF via clé USB, câble USB et FTP avec clé wifi en option
- Compatible avec logiciel PC ECG par câble USB
- Code réglage admin : 123456



Cardiomate 3,6,12 Configuration

- Connecter la batterie (sous l'appareil en dévissant la trappe)
- Régler le format d'heure et la date (config F4) et menu 7
- Régler l'export en PDF – Config F4, menu 5, mot de passe 123456, cocher « image pdf »
- Bouton AUTO – mode 10s - cycle les modes d'affichage d'ECG (3X4, 3x4+1, 6X2...) – si on veut le 12 piste en PDF il faut être sur le mode 1X12, l'appareil imprimera au max de ses capacité (en 3X4+1 sur Cardiomate 3)
- Bouton RHY – mode 60s – cycle le mode DII long (une dérivation ou plus)
- Bouton F1 Patient – Edition de la fiche patient
- Bouton Start/Stop – lancement de l'acquisition de l'ECG et impression thermique
- Bouton F3 Fichier – revue des ECG en mémoire, export sur clé USB, ou transfert par FTP (F1 transmission)

Cardiomate 3,6,12 FAQ

- Pas d'export en PDF : vérifier que la fonction PDF soit activée dans le menu admin (attention les ECG fait précédemment ne seront pas disponible en PDF)
- Pas de charge batterie : vérifier que la batterie est bien connectée, vérifier aussi que le chargeur utilisé soit bien celui de l'appareil (c'est un 24V avec une LED bleue)
- Pas de connexion avec le PC par câble USB : il faut utiliser un câble USB-a / UBS-b, le partie USB-b se connecter à l'ECG et l'USB-a au PC ou au MAC.
- Pas d'impression thermique : vérifier que le papier soit bien chargé dans l'appareil avec l'enrouleur, vérifier que l'imprimante thermique est bien sélectionnée dans le menu Config F4 et menu 1, vérifier que le mode AUTO soit activé.
- Export en PDF en WIFI
 - Nécessite la clé wifi USB
 - Installation d'un serveur FTP sur le PC et configuration des paramètres de communication (réseau et FTP) de l'ECG
 - Envoi des ECG via le menu F3 Fichier et le bouton F1 Transmission