

joleti

- ▶ Oreiller qui combine le confort de la mousse à mémoire M-Flow+ et la fraîcheur du gel rafraîchissant.
- ▶ Équipé d'un tissu ICE qui rend la surface de l'oreiller plus fraîche.
- ▶ S'adapte parfaitement à la morphologie de l'utilisateur, aux contours de la tête et du cou.
- ▶ Dimensions : L. 60 x l.40 x H.12 cm

**Composition :**

- Mousse à mémoire de forme moulée 650 g
- Coussin en gel : 850 g/m<sup>2</sup>
- Housse extérieure : tissu élasthanne 150 g/m<sup>2</sup>, avec passepoil bleu tout autour.



**UTILISATION**

- Prenez soin de bien respecter le sens d'utilisation de l'oreiller.
- L'oreiller convient à tous les types de morphologies. Néanmoins, une période d'adaptation de quelques jours peut être nécessaire afin que votre corps s'habitue.
- Votre oreiller peut également être housé à l'aide d'une conte d'oreiller conventionnel.

**MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de réserver l'utilisation de l'oreiller à une seule et même personne.
- Il est conseillé d'acquérir une taie de rechange à utiliser lors des lavages de la taie principale, une utilisation prolongée sans conte pouvant affecter la durée de vie de l'oreiller.
- Prendre garde à ne pas exposer un oreiller ou sa taie près d'une flamme ou d'un matériau incandescent (briquet, cigarette, cheminée...) ou à proximité d'une source de chaleur importante (radiateur électrique.).
- En cas de pathologie particulière ou de douleurs persistantes lors de l'utilisation de l'oreiller, demander l'avis de votre médecin.
- Ne pas brûler ou jeter dans la nature.
- L'oreiller peut être légèrement odorant lorsqu'il est neuf. Ce phénomène temporaire est tout à fait normal et totalement inoffensif. Dans le cas où cela serait incommodant, nous vous conseillons de bien aérer votre produit et votre chambre les premiers temps. L'odeur se dissipe naturellement et totalement au bout de quelques jours.

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

- Stocker impérativement à plat.
- Stockage longue durée, dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

- L'oreiller est élaboré à partir de matériaux de qualité. Toutefois, afin de préserver durablement ses propriétés de confort et de bien-être, veuillez suivre scrupuleusement les indications d'entretien suivantes :
- **Oreiller :** Nettoyage de surface avec une lingette/éponge légèrement imprégnée d'eau savonneuse, puis rinçage avec une lingette/éponge légèrement imprégnée d'eau claire.
- **Taie :** Lavage à 30°C - Ne pas utiliser de produits chlorés. Pas de séchage en tambour. Séchage à l'air libre. Repasser à température modérée.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE FOURNISSEUR

18 13 155 000

Oreiller gel ERLY JOLETI

HK-G-01



La Centrale Médicale  
ZI de la Petite Dimerie  
15, rue du 11 Novembre  
62310 FRUGES (FRANCE)



HEALTHCARE Co., LTD  
N° 999, Gaonan Road, Dingyan Town,  
Rugao City, Jiangsu Pro.,  
P.R China

