

# exeolrinse matic

## Liquide de rinçage activateur de séchage

► Solution concentrée pour le rinçage final en LDI ou tunnel de lavage des instruments chirurgicaux et accessoires, avant stérilisation.

- Neutralise les résidus alcalins.
- Usage en eau adoucie ou déminéralisée.
- Compatible avec les aciers inoxydables selon la norme NF S94-402-1 (Mai 2004).



LAVEURS  
DÉSINFECTEURS  
D'INSTRUMENTS  
ET TUNNELS

### Mode d'emploi

**exeolrinse matic** est une solution concentrée.

#### • Bidons de 5L et 10L :

Lors de la première utilisation, avant de dévisser le bouchon, retirer la bague d'invulnérabilité. Installer le bidon à l'emplacement prévu dans ou près du laveur-désinfecteur, et y plonger la canne de prélèvement pour la phase de rinçage.

En cas de changement de produit dans le laveur-désinfecteur, purger et rincer au préalable les tuyaux et le système de dosage avec de l'eau claire. Ne pas recycler la solution de rinçage.

**exeolrinse matic** doit être injecté lors de la phase de désinfection thermique (étape de rinçage final) après la phase de lavage avec un produit de la gamme **exeol** spécifique pour LDI.

Dilution comprise entre 0,03% (0,3mL/L) et 0,1% (1mL/L). La dose optimale dépend des spécificités du site (qualité d'eau, type de laveur-désinfecteur et de matériel à traiter).

Respecter les instructions des fabricants des dispositifs médicaux à traiter et du laveur-désinfecteur.

### + PRODUIT

UTILISATION  
A FAIBLE DOSE

SANS  
TRACE

### BONNES PRATIQUES



Dossier produit disponible sur  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

Composition	Caractéristiques	Précautions
Acide organique, agent de surface anionique et agent de surface non ionique, conservateurs (BENZYL ALCOHOL), colorant.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ pH pur : 2,1 - 3,1</li><li>▪ pH à 0,03% : 6,2 - 7,2 (en eau déminéralisée)</li><li>▪ pH à 0,1% : 5,0 - 6,0 (en eau déminéralisée)</li><li>▪ Parfum : Non parfumé</li><li>▪ Couleur : Vert</li></ul>	Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. <b>UFI : U3C9-F0WX-N00F-AHDF</b>

### Présentations commerciales

- Carton 2 x 5L LDI : EXS0071
- Bidon 10L : EXS0077

### UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

DM classe I  
Marqué CE en 2022



Sodel  
190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France  
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.exeol.fr](http://www.exeol.fr)

**SANTÉ**  
**exeol**  
UNE DIVISION SODEL