



Flacon de gel brûlures Hydrogel

Gamme Spécifique

RÉFÉRENCE : GEL 9308 BR

Gencod : 5407006144151

ARTICLE

DESCRIPTION

Ce gel stérile anti-brûlure hydratant, est un gel à base d'eau, soluble dans l'eau, qui évacue la chaleur d'une brûlure tout en soulageant la douleur, en refroidissant la peau et en protégeant contre la contamination par l'air.

En appliquant ce gel dès que possible, la chaleur de la brûlure est dissipée, ce qui aide à empêcher la chaleur de progresser plus profondément dans la peau.

Le gel est composé à 90 % d'eau purifiée et a le même effet rafraîchissant que l'eau, mais comme il est épais, il reste sur la brûlure et s'évapore à un rythme très lent.

Tout résidu de gel sur une plaie brûlée sera éliminé au contact de l'eau.

FORMATS DISPONIBLES

Flacon de 118 ml

UTILISATION

Appliquez une couche généreuse de gel sur la zone affectée, en laissant le gel recouvrir la plaie. Ne frottez pas. Laissez le gel sur la plaie pendant au moins 30 minutes.
Usage Externe

Dispositif Médical de classe IIb, conforme au règlement européen 2017/745 soumis à obligation de traçabilité.

Detectaplast®

Hydrogel burn gel
118ml

Stops burn progression
Lowers skin temperature
Relieves pain



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.