



Imperméable avec Manches Longues et Capuche pour Utilisateur de Fauteuil Roulant



VA127ST

Instructions d'utilisation et d'entretien

INTRODUCTION

Merci d'avoir décidé d'acheter l'imperméable avec manches longues et capuche Aidapt pour utilisateur de fauteuil roulant. Lorsqu'il est utilisé correctement, il est conçu pour offrir un service fiable et sans problème pendant de nombreuses années.

NB Cet équipement doit être installé par une personne compétente

AVANT UTILISATION

- Retirez soigneusement tous les emballages. Évitez d'utiliser des couteaux ou d'autres instruments tranchants car cela pourrait endommager l'article.
- Vérifiez le produit pour tout dommage visible. Si vous constatez un dommage ou suspectez un défaut, n'utilisez pas votre produit et contactez votre revendeur.

UTILISATION PRÉVUE

L'imperméable avec manches longues et capuche Aidapt pour utilisateur de fauteuil roulant assure la protection contre les intempéries. Il peut être enfilé ou enlevé facilement et dispose d'une capuche ajustée.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

L'imperméable avec manches longues et capuche Aidapt pour utilisateur de fauteuil roulant peut facilement être enfilé et mis en place facilement puis ajusté si nécessaire;

- Ouvrez complètement l'ouverture du cou et passez l'imperméable par la tête.
- Assurez-vous que les poignées de poussée dépassent des fentes arrière.
- L'ouverture du cou peut être zippée vers le haut ou le bas à volonté et la capuche peut être relevée et nouée.
- Si nécessaire, attachez l'imperméable au fauteuil roulant en utilisant les attaches latérales.

NETTOYAGE

Nettoyez votre imperméable avec un détergent doux uniquement et avec un chiffon doux légèrement humide. Utilisez uniquement un détergent doux ou un désinfectant doux; n'utilisez jamais de nettoyeur abrasif.

L'imperméable avec manches longues et capuche Aidapt pour utilisateur de fauteuil roulant peut être lavé en machine à laver à basse température, idéalement sur un programme laine ou délicat. Après le nettoyage, suspendez le dans un endroit chaud et sec. Ne le laissez pas en contact direct avec une source de chaleur et ne le mettez pas au sèche-linge.

INFORMATION IMPORTANTE

Les informations données dans ce manuel d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie intégrante ou établissant un quelconque contrat ou autre accord mutuel entre Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Pays de Galles) Ltd ou ses agents ou ses filiales et aucune garantie ou représentation concernant les informations n'est donnée.

Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lorsque vous utilisez ce produit. En tant qu'utilisateur, vous devez accepter la responsabilité de la sécurité lors de l'utilisation du produit. N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre produit.

Aidapt Bathrooms Ltd.

Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France

Tel: 05 63 48 15 1 Fax: 05 63 37 61

Email: Altai.Europe@orange.fr