



VM935A Disque de Transfert

Notice d'Utilisation et d'Entretien

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté Disque de Transfert Aidapt. Si vous l'utilisez de manière appropriée, il vous donnera entière satisfaction pendant longtemps.

N.B. LE DISQUE DE TRANSFERT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC L'AIDE D'UN SOIGNANT ET APRÈS UNE ÉVALUATION DES RISQUES QUANT À LA CONVENANCE DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER.

2. AVANT UTILISATION

Enlevez soigneusement l'emballage. Évitez l'utilisation de couteaux ou outils tranchants qui pourraient endommager la surface du produit. Vérifiez que le produit ne présente pas de défaut. Si tel est le cas, merci de contacter votre revendeur.

6. UTILISATION PRÉVUE

Le Disque de Transfert léger Aidapt permet une rotation facile dans les deux sens pour aider le transfert de l'utilisateur vers et à partir d'un lit, une chaise, une voiture, etc.

7. MODE D'EMPLOI

Le disque de transfert a été conçu pour aider le personnel soignant à transférer un patient / utilisateur en toute sécurité à partir d'un fauteuil au lit, dans et hors d'une voiture, etc., et permet d'éviter les maux de dos.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.com Email: sales@aidapt.co.uk

N. B. S'assurer que la surface sur laquelle le disque est posée est horizontale et stable. S'il risque de glisser, nous vous conseillons de le poser sur un tapis antiglisse.

Positionner le plateau de transfert à l'endroit approprié pour le transfert, au besoin. Avec l'aide du soignant, asseyez-vous sur le disque de transfert, de manière à répartir uniformément votre poids sur le disque. Tournez le disque dans la direction souhaitée, genoux rapprochés. Lorsque vous êtes dans la bonne position, vous pouvez vous transférer au lit / chaise / siège de la voiture, etc.

3. NETTOYAGE

Nettoyez disque de transfert avec un détergent doux non-abrasif et un chiffon doux. Les produits de nettoyage type AJAX et/ou les éponges abrasives pourraient sérieusement endommager votre produit. Vous ne devez pas les utiliser pour nettoyer votre produit. Veuillez toujours bien sécher votre appareil après le nettoyage.

4. MAINTENANCE

Veuillez vérifier régulièrement l'état de votre produit ou si vous avez le moindre doute.

5. INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations continues dans cette notice ne constituent pas un engagement contractuel par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses filiales ou agents et aucune garantie ni représentation n'est fournie concernant ces informations.

Veuillez faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

N'hésitez pas à demander des conseils à votre revendeur ou au fabricant concernant l'assemblage et l'utilisation du produit.