



Coussin gonflable en forme d'anneau



VM934B (sans pompe) / VM934BB (avec pompe)

Instructions d'utilisation et d'entretien

Ce fichier est disponible pour visualisation et téléchargement au format PDF à l'adresse www.aidapt.co.uk. Les clients malvoyants peuvent utiliser un PDF gratuit Reader (tel que adobe.com/reader) pour effectuer un zoom avant et augmenter le texte taille pour une meilleure lisibilité. Veuillez examiner votre produit pour tout dommage visible avant d'utiliser / d'installer. S'il est endommagé ou si vous suspectez un défaut, veuillez ne pas utiliser, contactez votre fournisseur.

UTILISATION PRÉVUE

Le coussin gonflable en forme d'anneau Aidapt réduit la pression en position assise. Cela aide aussi à répartir le poids de manière uniforme et facilite pour l'utilisateur le maintien d'une bonne position assise. Gonflez le coussin à la bouche ou à l'aide d'une pompe (telle qu'une pompe à main pour matelas gonflable ou similaire. Pompe non fournie.). NB Évitez que des objets pointus tels que des fermetures éclair et des clés entrent en contact avec le coussin, cela pourrait endommager la housse ou l'intérieur gonflable. Ne jamais utiliser un compresseur pour gonfler le coussin. Lorsque vous gonflez cet article à la bouche, vous devrez peut-être mordre la base de la valve tout en soufflant pour ouvrir les voies respiratoires.

NETTOYAGE

Nettoyez votre coussin gonflable avec un détergent doux uniquement ou avec un chiffon doux légèrement humide. Utilisez uniquement un détergent doux ou un désinfectant doux; n'utilisez jamais de nettoyeur abrasif. Après le nettoyage, essuyez le coussin gonflable avec un chiffon sec avant de le ranger dans un endroit chaud et sec, mais pas en contact direct avec une source de chaleur.

SOIN ET ENTRETIEN

Veuillez effectuer un contrôle régulier du produit ou si vous avez le moindre doute.

INFORMATION IMPORTANTE

Les informations données dans cette notice ne doivent pas être considérées comme faisant partie intégrante ou établissant un engagement contractuel ou autre de la part d'Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Pays de Galles) Ltd ou ses agents ou ses filiales et aucune garantie ou représentation concernant les informations est donné. Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lorsque vous utilisez ce produit en tant qu'utilisateur, vous devez accepter la responsabilité de la sécurité lors de l'utilisation du produit. N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions concernant l'assemblage / l'utilisation de votre produit.

Aidapt Bathrooms Ltd.
Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France
Tel: 05 63 48 15 1 Fax: 05 63 37 61
Email: Altai.Europe@orange.fr