

Gamme Arpégia Attache-poignets


Gamme ARPEGIA : gamme conçue avec les principes fondamentaux du maintien et de l'immobilisation : facilité de mise en place, sécurité dans l'utilisation, confort, rapidité, respect du patient.



Attache-poignets					
Dimensions (en cm)*					
	a	b	c**	d	e (velours + crochet)
07.1305	10	27	60	20	13 + 7

*Dimensions données à titre indicatif

**Sangle desserrée au maximum

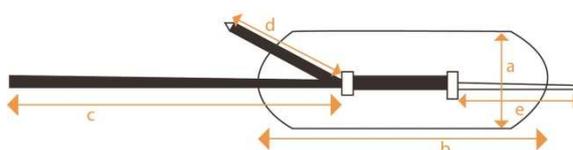

Conseils d'installation :

1. Enrouler la bande de tissu autour du poignet et fixer les bandes auto-agrippantes
2. Passer la sangle autour de l'accoudoir.
3. Refermer l'attache rapide
4. Régler la sangle suivant la morphologie du patient

Limite d'utilisation : Ne convient pas aux personnes très agitées

Composition :

- Maille grattée sur mousse Polyuréthane avec envers bouclette
 - Maille grattée : 100% Polyester
 - Mousse : 100% Polyuréthane - 20kg/m³
 - Bouclette : 80% Coton et 20% Polyamide
- Biais : 100% Coton
- Bandes auto-agrippantes : 100% Nylon
- Sangles : 100% Polypropylène
- Boucles : 100% Acétal
- Vendu par paire

Entretien :



Séchage à l'air ambiant préconisé – Fermer les boucles avant le passage en machine.

Avant toute nouvelle utilisation, vérifier l'usure et les éventuels dommages sur les points suivants : tissu, sangle, couture, boucle. Ne pas utiliser un matériel endommagé.

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.